

התוויות נגד

ה-CLATUU Alpha אינו מיועד לשימוש על מטופלים עם:

- נשים הרות או מניקות
- המוגלובינוריה קרה פרוקסימאלית.
- קריוגלובולינמיה.

אמצעי זהירות למטופל

יש לקבוע האם הטיפול מתאים למטופלים על פי המצבים הבאים:

- אורטיקריה קרה או מחלת רנו.
- כשל במחזור הדם ההיקפי של אזור הטיפול.
- נירופתיה כמו נירופתיה סוכרתית או נירלגיה פוסט-הרפטית.
- דיסאסטזיה עורית.
- פצעים פתוחים או מזוהמים.
- הפרעת דימום או שילוב של נוגדי קרישה.
- ניתוח שאירע לאחרונה או רקמת צלקת באזור הטיפול.
- מחלות עור כמו אקזמה, דרמטיטיס או פריחה
- בקע באזור הטיפול.

אמצעי זהירות להליך

כדי להימנע מסכנות בטיחות במהלך הטיפול עם CLATUU Alpha:


- אין להשתמש ב-CLATUU Alpha ללא השלמת הדרכה על ידי נציג CLASSYS מורשה.
- למניעת שימוש בלתי מורשה במכשיר, יש לוודא כי הגישה מוגבלת אך ורק לכוח אדם מיומן ומוסמך.
- יש להימנע מטיפול על אזורים גרומים או אזורי עצבים.
- במידה ומתרחשות תקלות או אירועי לוואי, יש לעצור מיד את הליך הטיפול.
- יש תמיד להשתמש ברפידת המגן של CLATUU באזורי היעד כחומר מגן בין המכשיר הידני והעור טרם ביצוע טיפול CLATUU Alpha.
- טרם הפעלת היניקה, יש לבדוק שהמכשיר הידני מונח כראוי על העור.
- אין לתפעל את המכשיר הידני של CLATUU Alpha בזווית של 45° ומעלה ללא הוספת תמיכה מספקת שתבטיח מגע שלם עם העור.

אמצעי זהירות לבטיחות המערכת

על מנת להבטיח את בטיחות המערכת ותחזוקה הולמת של CLATUU Alpha:

- כדי למנוע התחשמלות, יש תמיד לבדוק את המכשיר הידני והכבל טרם השימוש.
- אין להשתמש בכבל פגום או עם נזל דולף.
- אין להסיר את כיסויי הגוף הראשי או המכשיר הידני של ה-CLATUU Alpha שכן שינוי ציוד זה אינו מורשה.
- ה-CLATUU Alpha אינו מכיל רכיבים ניתנים לשירות על ידי המשתמש. יש ליצור קשר עם משווק מקומי או עם נציג CLASSYS אם המערכת דורשת שירות.
- אין להישען על הציוד באלכסון ואין לתת שוק חיצוני פיזי לציוד שכן זה עלול לגרום לנזק קבוע למערכת.
- אין להשתמש בציוד עם גז הרדמה או חומרים דליקים באזורים סביבו.
- יש לוודא להשתמש רק ברפידות מגן CLATUU שיוצרו וסופקו על ידי CLASSYS.

1 בחר קאפ בעזרת מדריך הקאפים

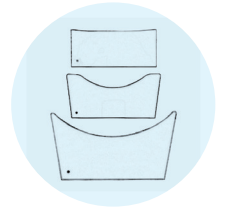


2 חבר את הקאפ




3 בדוק את סטטוס כרטיס ה-SAT



4 הגדר פרמטרים

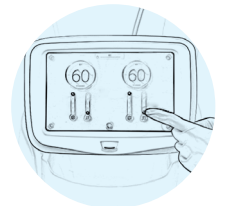

5 הנח את רפידת המגן של CLATUU

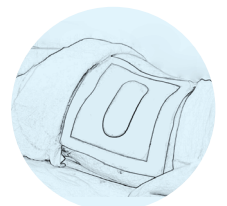



6 הנח את המכשיר הידני




7 הסר את הקאפ



רפידת מגן CLATUU

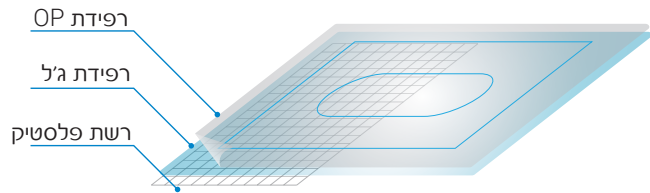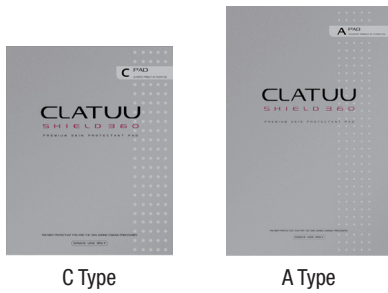

סוג A

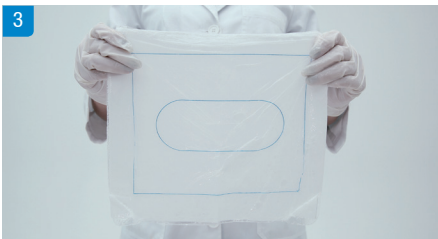

3 פתח את רפידת המגן סוג A של CLATUU וודא כי השכבות שלמות.




2 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג A של CLATUU מהאריזה



1 פתח את רפידת המגן סוג A של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



6 החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני על המרכז המסומן של רפידת מגן סוג A של CLATUU

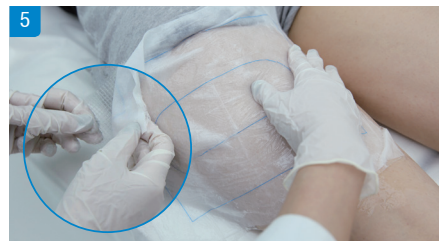

5 הסר את השכבה התחתונה של רשת הפלסטיק מרפידת המגן סוג A של CLATUU.



4 הנח את רפידת המגן סוג A של CLATUU במרכז אזור הטיפול המסומן

סוג C



4 הסר את השכבה התחתונה של רשת הפלסטיק מרפידת המגן סוג C של CLATUU.




2 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג C של CLATUU מהאריזה.




1 פתח את רפידת המגן סוג C של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



7 התחל בהליך

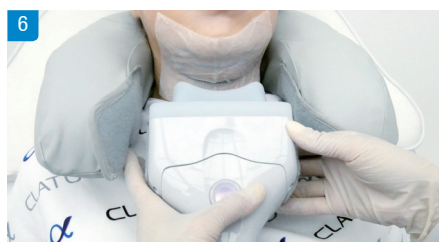

6 הנח את המכשיר הידני על אזור הטיפול המסומן

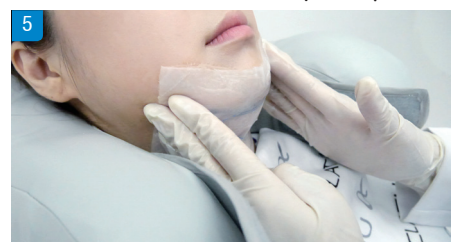

5 הנח את רפידת המגן סוג C של CLATUU במרכז אזור הטיפול המסומן. החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני.

כרטיס SAT \odot

יישום

מונה טיפולים נותרים: מספר הטיפולים הנותרים של כרטיס ה-SAT הנוכחי (סך של 50 טיפולים זמינים).

אמצעי זהירות

- מונה הטיפולים הנותר מחסיר 1 מכל מכשיר ידני.
- מונה הטיפולים הנותר מחסיר 2 לשני מכשירים ידניים.
- הפחתות המונה מתחילות 2 דקות לאחר התחלת ההליך.
- במקרה בו רפידת המגן אינה צמודה כיאות, יש להניח שוב רפידת מגן חדשה בתוך 2 דקות מבלי שיופחת מונה מכרטיס ה-SAT.
- אם מונה הטיפולים הנותרים מגיע ל-0, יש להכניס כרטיס SAT חדש עם מספיק טיפולים נותרים לביצוע הטיפול.
- יש לוודא כי במונה הטיפולים הנותרים יש מספיק טרם התחלת הטיפול.
- במידה ומתגלה שגיאה ביישום לאחר 2 דקות, יש לעצור את ההליך מטעמי בטיחות.

טבלת כרטיס SAT \odot

רק מכשיר ידני אחד יתפקד	אם ערך מונה הטיפולים הנותרים הוא 1
מכשירים ידניים פעילים יעצרו מיד	אם כרטיס ה-SAT מתנתק במהלך ההליך
ניתן להמשיך בטיפול	אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק
אין מונה טיפולים נותרים או במהלך העמסה	אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק מהבהב
זוהתה שגיאה	אם בכרטיס ה-SAT יש אור אדום

⚠ אזהרה!

הכנסת כרטיס ה-SAT לכל מכשיר אחר או הכנסת כבל USB אחר ליציאת ה-USB של כרטיס ה-SAT עלול לגרום לתקלות.

כרטיס SAT (טוקן גישה למערכת) \odot

רכיב של CLATUU Alpha המיועד ספציפית למטרת שימוש הולם ובטוח עם רפידת המגן CLATUU במהלך הטיפול.

פרטי כרטיס SAT \odot

סוג A	כמות
כרטיס SAT	1
רפידות מגן סוג A של CLATUU	50
סוג C	כמות
כרטיס SAT	1
רפידות מגן סוג C של CLATUU	50

הכנסת כרטיס אבטחה ותצוגת GUI \odot



תצוגת מונה טיפולים נותרים



ניקוד שמן


- בצע כשהודעת שגיאה מוצגת כמתואר.
- וודא כי כיבית את המערכת טרם הביצוע.
- המתן 10-15 דקות, עד שכ-200 מ"ל שמן ינוקזו לגמרי מהמערכת.



3 יישר והכנס את מחבר אוסף השמן לפתח.




2 התכונן לחבר את אוסף השמן לפתח.

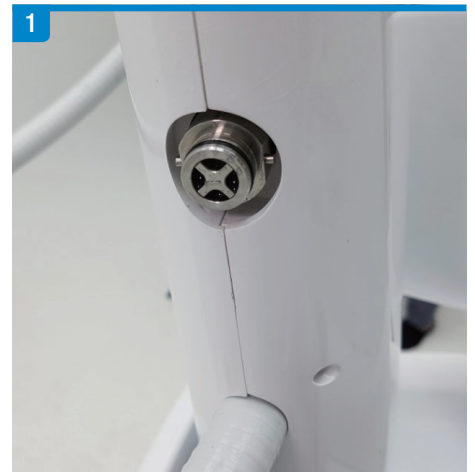

1 בדוק את יציאת אוסף השמן הממוקם מאחורי מעמד הזרוע.




5 בדוק כי השמן מנוקז היטב דרך מחבר אוסף השמן. השאר את אוסף השמן מחובר עד שהשמן נוקז לגמרי מהמערכת. לאחר ניקוד מוצלח, הוצא את אוסף השמן ממעמד הזרוע בסדר הפוך.

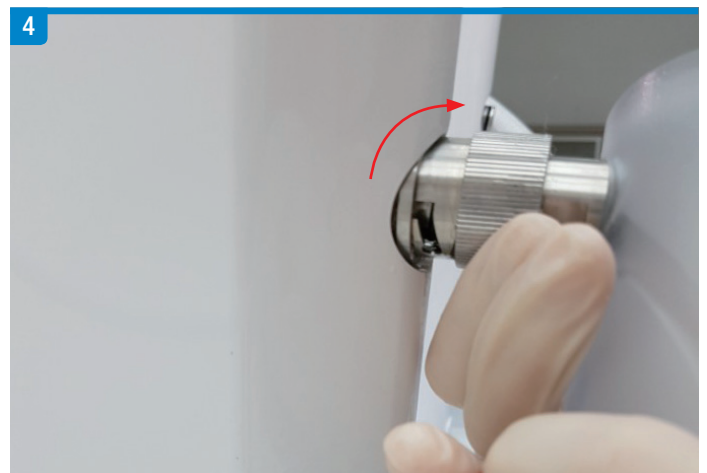

4 לאחר הכנסת מחבר אוסף השמן לפתח, סובב את המחבר ימינה להבטחת חיבור חזק.

ממשק משתמש גרפי

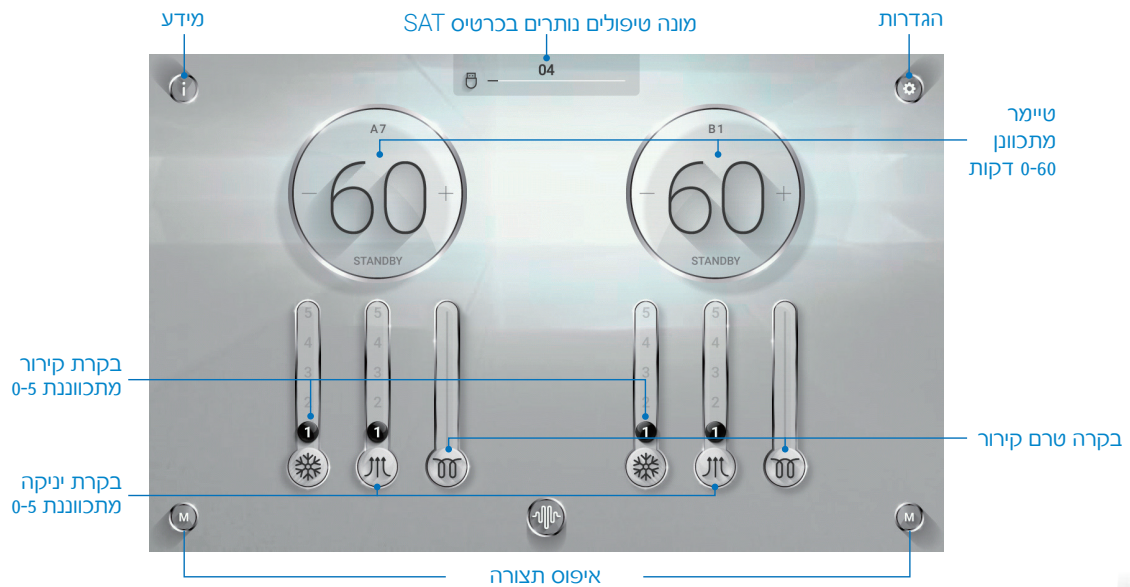

פעולה	מצב
מצב החלפת קאפ שתי שניות	STANDBY > PROGRESS
לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות	PROGRESS > STANDBY
לחץ על שני הכפתורים לשתי שניות	מצב החלפת קאפ

אות	סימן
אור לבן קבוע	המתנה
אור לבן מהבהב	טיפול הושלם, יניקה פועלת
אור כחול קבוע	יניקה פועלת, קירור בהתקדמות
אור כחול מהבהב	יניקה לא הושלמה
אור צהוב קבוע	מצב החלפת קאפ



GUI



זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	3~4

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	2~3

WING 




זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	3~4

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	3~5

WING PLUS 

WING PLUS

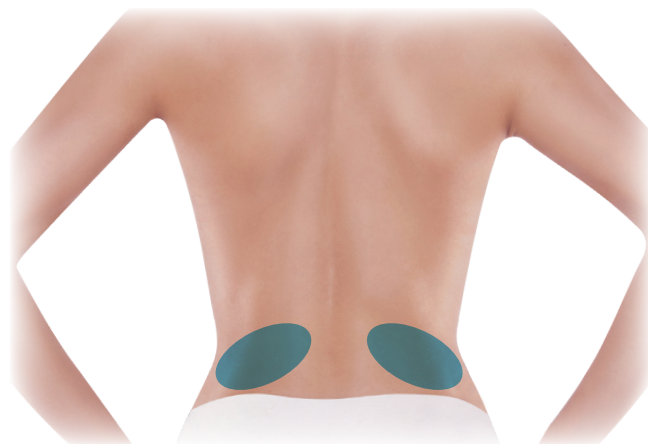

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	3~4

FLAT MINI 



זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

FLAT MINI 



זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3


ARC-T 



זמן	קירור	יניקה	זמן	קירור	יניקה
50 דקות	4~5	3~4	50 דקות	4~5	3~4

יש להשתמש ברפידת ג'ל סוג T לפי אזור הטיפול.

WING MAX 

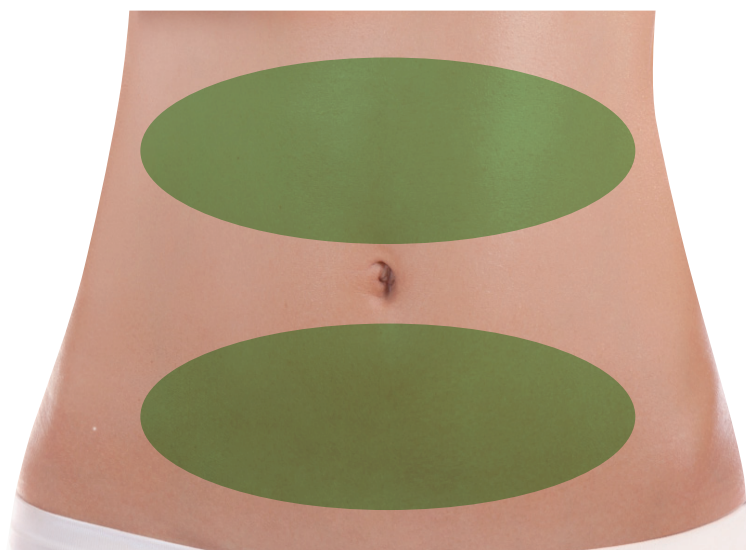

זמן	קירור	יניקה
50 דקות	4~5	3~4

יש להשתמש ברפידת ג'ל סוג B לפי אזור הטיפול.