

מדריך טיפולים
מהדורה 3.0

CLASSYS
Technology for better life

Freeze ON
Fat OFF



CLATUU α

No Limitations

תוכן עניינים

הקדמה

-מערכת CLATUU Alpha
-הטכנולוגיה המתקדמת CLATUU Alpha
-קאפ CLATUU Alpha
-כרטיס SAT
-GUI

לפני הטיפול

-מטופלים מתאימים לטיפול
-התוויות נגד
-איך להיוועץ במטופלים
-ניהול כאב

טיפול

-הכנה לטיפול
-רפידת ג'ל CLATUU Alpha
-סוג A
-סוג C
-סוג B
-סוג D
-תהליך הטיפול
-תנוחת הטיפול
-תנוחה בטוחה ונוחה למיני קאפים
-פרמטרים

לאחר הטיפול

-פרטי בטיחות
-שאלות ותשובות
-לאחר הטיפול

תחזוקה

-ניקוי הצינור
-ניקוז שמן
-הכנסת מים



טיפול

ההנחיות ואמצעי הזהירות הבאים מיועדים לביצוע שיטות פרוצדורליות מתאימות למטופל עם הגוף הראשי ומערכת CLATUU Alpha.
יש לעיין בהוראות אלו לטיפולים בטוחים ומוצלחים עם CLATUU Alpha.



מערכת CLATUU Alpha



CLATUU Alpha הינו המכשיר המתקדם ביותר להקפאת שומן. התהליך כולל קירור לא פולשני של תאי שומן להפחתת ליפוליזה מבלי לגרום נזק לסוגי הרקמות האחרים. מטרת טיפול CLATUU Alpha הינה לעצב מחדש את צורת הגוף, רק באופן לא פולשני בהשוואה לשאיבת שומן.


הטכנולוגיה המתקדמת של CLATUU Alpha

קירור מקיף ומשודרג של 360°

טכנולוגיית קירור מקיפה של 360° בניגוד לשיטות הקירור הדו-צדדיות הקונבנציונליות משפרת את האפקטיביות בעד 18.1%, ומאפשרת אספקת קירור לקאפ כולו, המסיר ביעילות רבה יותר את תאי השומן.


שיטות קודמות

טכנולוגיית קירור מקיפה של 360°

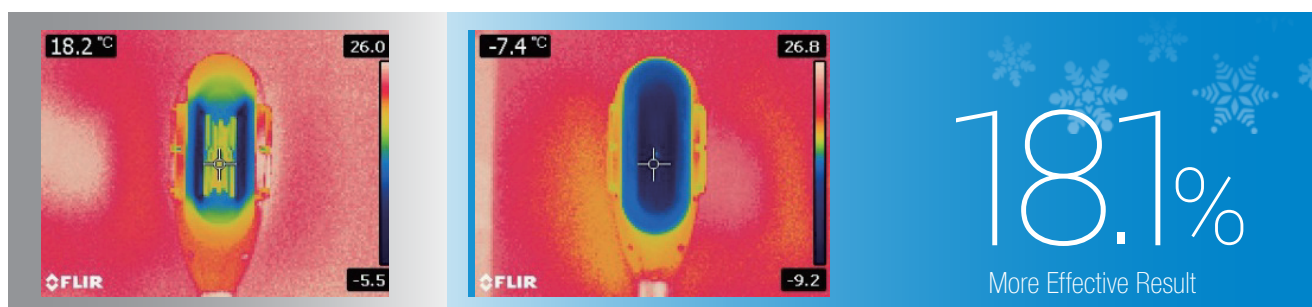

המדע מאחורי CLATUU Alpha

כל קאפ קירור מהונדס לטפל בשכבת השומן התת-עורית של המטופל מבלי לפגוע ברקמות או באזורי העצבים המקיפים, באמצעות טכנולוגיית קירור המתקדמת אתכם לעידן החדשני של CLATUU Alpha.

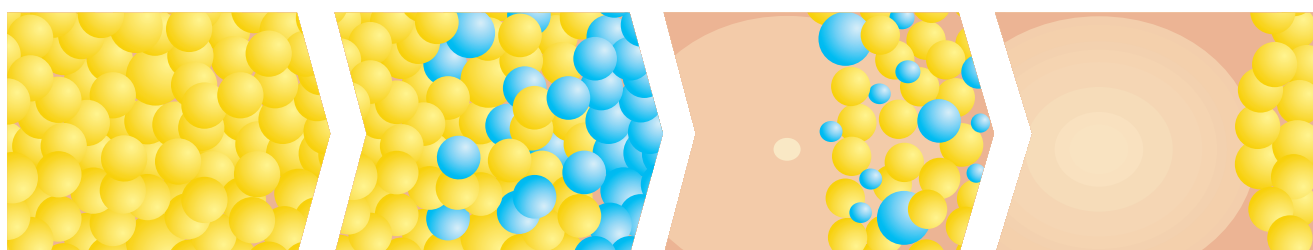

מיישם AI

CLATUU Alpha מתכנתת אוטומטית את הפרמטרים המומלצים לכל קאפ בעת חיבור קאפ הקירור המתאים ובכך מביאה לסילוק יעיל של שומן מיותר.

מהר יותר לנקודת היעד

מערכת הקירור של CLATUU Alpha מהונדסת להגיע לטמפרטורת היעד מהר יותר מדגמים קודמים, תוך הפחתת חוסר הנוחות של ההמתנה ומקסום יעילות הזמן הן למטופלים והם לרופאים.

רמות מתכווננות

לא רק של- CLATUU Alpha יניקה חזקה יותר ב-20 אחוז, היא גם מספקת למטופלים יכולת לכוון את רמות הקירור והיניקה על מנת לספק בבטחה טיפולים מותאמים אישית למטופלים.

קאפ CLATUU Alpha

7 סוגי קאפים


CLATUU Alpha כוללת מבחר קאפים לקירור, אשר שוכלל לכדי שלמות במעבדות המחקר והפיתוח שלנו ומתאים למגוון רחב של צורות גוף ומטופלים. כל קאפ עוזר להשיג מגוון תכניות טיפול מותאמות אישית להפחתת יעילה של תאי שומן וחווית עיצוב גוף אולטימטיבית.

שם	סוגי קאפים	אזורים
	WING לכיסוי שומן גדולים קאפ מתרחב למתאר רחב ומקומר	בטן עליונה בטן תחתונה אזורים גדולים אחרים
	WING PLUS לכיסוי שומן קטנים קאפ בעל קצה קהה למתאר שטוח	קו החזייה "צמיגים" גב
	FLAT לכיסוי שומן קטנים קאפ בעל קצה שטוח למתאר שטוח	בטן פנים הירכיים
	FLAT MINI לכיסוי שומן קטנים קאפ בעל קצה שטוח למתאר שטוח	סנטר כפול (צד) ברכיים (צד) אזורים מקומיים אחרים
	WING MINI לכיסוי שומן קטנים מתאים לאזורים מקומיים למתאר רחב ומקומר	בתי שחי (קדמי ואחורי) (מעל הברכיים)
	ARC-T לאזור הירכיים אזור רחב בבת אחת	סביב הירכיים אזורים רחבים ושטוחים
	WING MAX לכיסוי שומן גדולים אזור בטן רחב בבת אחת	בטן עליונה בטן תחתונה

SAT (טוקן גישה למערכת)

כרטיסי SAT המסופקים עם רפידות המגן מיועדים ספציפית לשימוש עם ה-CLATUU Alpha. נדרש לתפעול הולם ובטוח של ה-CLATUU Alpha.

מונה טיפולים נותרים (ברירת מחדל: 50)
מונה הטיפולים הנותרים יורד ב-1 לאחר כל שימוש
במכשיר ידני בטיפול.

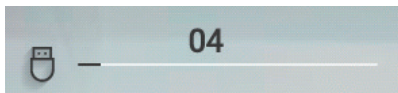

טבלת כרטיסי SAT

אם ערך מונה הטיפולים הנותרים הוא 1	רק מכשיר ידני אחד יתפקד
אם כרטיס ה-SAT מתנתק במהלך ההליך	מכשירים ידניים פעילים יעצרו מיד
אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק	ניתן להמשיך בטיפול
אם בכרטיס ה-SAT יש אור ירוק מהבהב	אין מונה טיפולים נותרים או במהלך העמסה
אם בכרטיס ה-SAT יש אור אדום	זוהתה שגיאה

אמצעי זהירות


- הפחתות המונה מיושמות כשתי דקות לאחר תחילת ההליך.
- במקרה בו רפידת המגן אינה מוצמדת כיאות, יש להצמיד אותה מחדש באמצעות רפידת מגן חדשה תוך 2 דקות.
- במידה ונתגלתה שגיאה ביישום לאחר פרק זמן של שתי דקות, יש לעצור את ההליך מטעמי בטיחות.
- יש לוודא כי במונה הטיפולים הנותרים יש מספיק לפני שממשיכים לטיפול.
- אם מונה הטיפולים הנותרים מגיע ל-0, יש להכניס כרטיס SAT חדש עם מספיק טיפולים נותרים לביצוע הטיפול.

⚠ אזהרה!

הכנסת כרטיס ה-SAT לכל מכשיר אחר או הכנסת כבל USB אחר ליציאת ה-USB של כרטיס ה-SAT עלול לגרום לתקלות.



ממשק משתמש גרפי

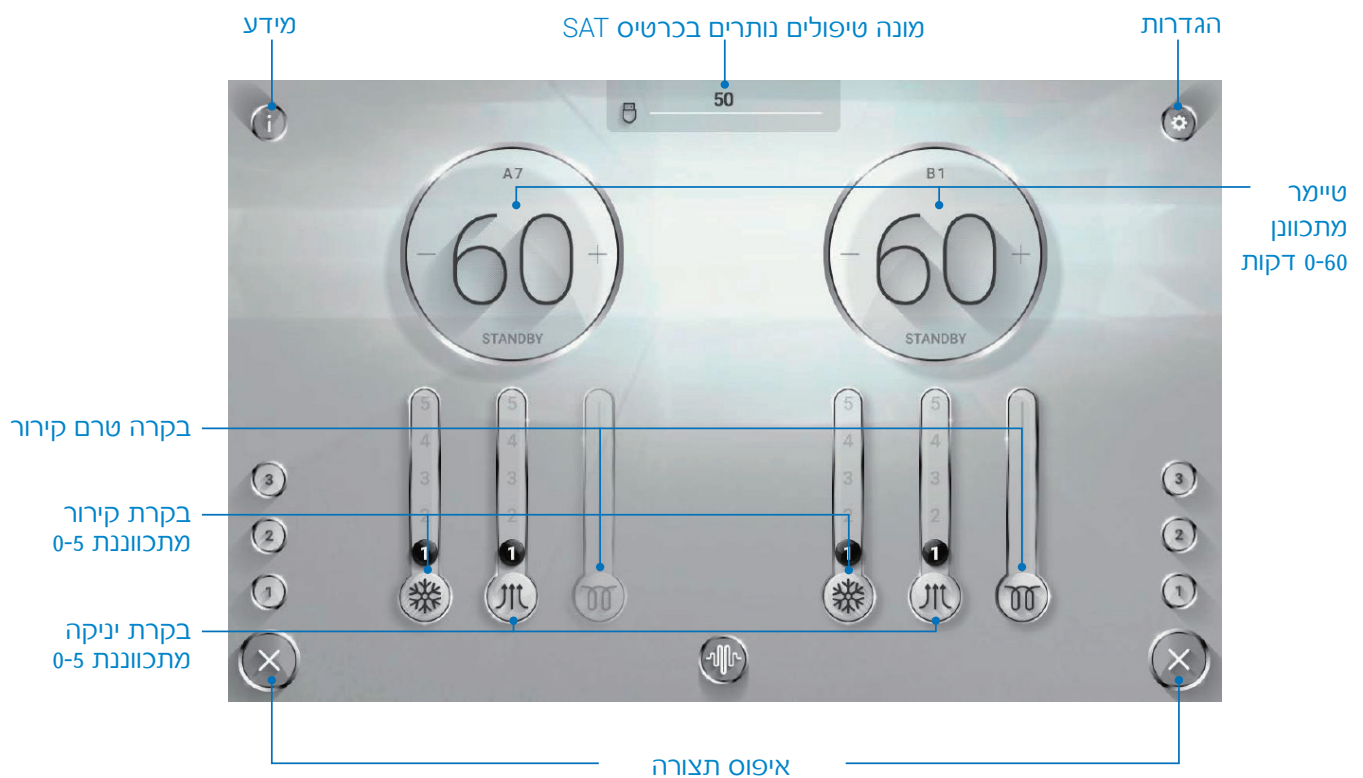

מצב	פעולה
STANDBY > PROGRESS	לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות
PROGRESS > STANDBY	לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות
מצב החלפת קאפ	לחץ על שני הכפתורים לשתי שניות

אות	סימן
אור לבן קבוע	המתנה
אור לבן מהבהב	טיפול הושלם, יניקה פועלת
אור כחול קבוע	יניקה פועלת, קירור בהתקדמות
אור כחול מהבהב	יניקה לא הושלמה
אור צהוב קבוע	מצב החלפת קאפ

איך להיוועץ עם מטופלים

תעד את ההיסטוריה הרפואית של המטופל

- מצב רפואי ותרופות נוכחיים
- ניתוחים קודמים
- אלרגיות לתרופות
- אבחנות וטיפולים רפואיים בעבר

הערכת אזורי היעד בטיפול

- היוועץ עם המטופל היכן לטפל.
- שני קאפים יכולים לעבוד בו זמנית, לדוגמה, לבטן התחתונה מימין ומשמאל וכו'.
- בחירת המטופל היא ההיבט החשוב ביותר בהצלחת הטיפול. יש לוודא את ביצוע הערכה מתאימה טרם טיפול בכל אזור ולהסביר למטופל מדוע אזורים מסוימים אינם אידאליים לטיפול.
- יש להדגיש את היבט החסכון בזמן של הטיפול למטופל.

בחירת קאפ

- קאפ מסוג WING: לכיסי שומן גדולים, כמו אלו על הבטן העליונה, מותניים.
- קאפ מסוג FLAT: לכיסי שומן גדולים כמו פנים הירכיים, הבטן והזרועות העליונות.

תקשורת עם המטופל לגבי טיפול CLATUU Alpha


- איך זה עובד.
- רמות חוסר הנוחות הפוטנציאליות.
- תופעות לוואי אפשריות.
- תשובות לשאלות ספציפיות של המטופל.

ניהול כאב

הליכי CLATUU Alpha אינם דורשים הרדמה. במהלך ההליך, המטופל ירגיש חוסר נוחות קל במשך עשר הדקות הראשונות, שייעלם בקביעות ככל שהרקמה הופכת רדומה יותר מהקאפ הקר. בעת השמת הקאפ הראשון, התחושה היא שהעור נמשך בחוזקה לשואב. כאשר תהליך הקירור מתחיל, ייתכן ותהיה תחושה מעקצצת או קרה בעשר הדקות הרשומות. לאחר מכן, המטופל אמור לחוש בנוח בשאר הטיפול.

מטופלים מתאימים לטיפול

- אדם בכושר טוב יחסית, אך עם מצבורים קלים של שומן לא רצוי.
- אדם המבקש הפחתה נקודתית של אזור שומן ספציפי.
- הליך ה-CLATUU Alpha אינו מיועד לירידה במשקל או השמנת יתר חולנית.
- אם אזור היעד דק, ייתכן כי הטיפול לא יתאים והתוצאות הקליניות עשויות להשתנות משמעותית.
- יישומים נפוצים מוצגים להלן: סנטר כפול, זרועות עליונות, בטן, צדדים, ירכיים, גב, קו החזיה, "צמיגים" ומותניים.

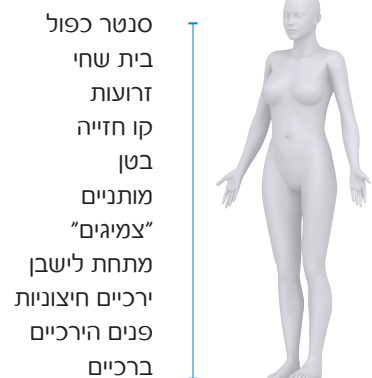

התוויות נגד

CLATUU Alpha אינו מומלץ למטופלים הסובלים מהבאים:

- קריוגלובולינמיה.
- המוגלובינוריה קרה פרוקסימאלית.
- נשים הרות או מניקות.
- רגישות לאורטיקריה קרה או מחלת רנו.
- כשל במחזור הדם ההיקפי של אזור הטיפול.
- נזירופתיה כמו נזירופתיה סוכרתית או נזירלגיה פוסט-הרפטית.
- דיסאסטזיה עורית.
- פצעים פתוחים או מזהמים.
- הפרעת דימום או שילוב של נוגדי קרישה.
- ניתוח שאירע לאחרונה או רקמת צלקת באזור הטיפול.
- בקע באזור הטיפול.
- מחלות עור כמו אקזמה, דרמטיטיס או פריחה
- * למצבים אחרים, יש לפנות אל הרופא המקומי או המטפל ליעוץ.

הכנה לטיפול



מכוון מיקום
כפות רגליים



מגבת



תבנית



מחוגה



סרט מדידה



כפפות לטקס וטוש



רפידות ג'ל




מגבוני אלכוהול




טישו

רפידת מגן ג'ל 360 של CLATUU - סוג A

- רפידת הג'ל של Classys הינה רכיב חיוני בהליך CLATUU Alpha שכן אושרה על ידי CE ו-KFDA.
- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות, לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר, שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופל העובר את הטיפול.
- חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקוריות של Classys על פי ההוראות.

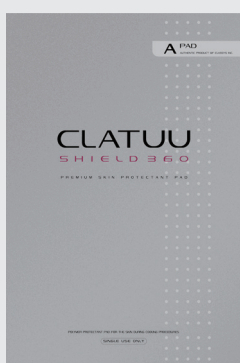

סוג A

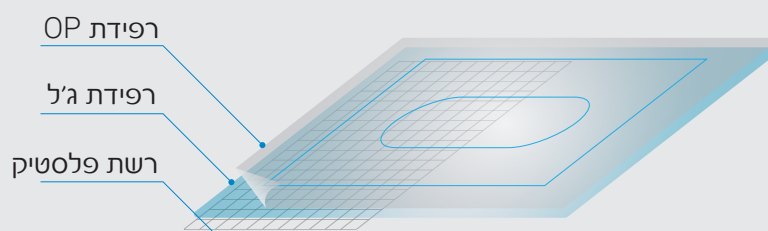

3 פתח את רפידת המגן סוג A של CLATUU וודא כי השכבות שלמות.




2 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג A של CLATUU מהאריזה.



1 פתח את רפידת המגן סוג A של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



6 החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני על המרכז המסומן של רפידת מגן סוג A של CLATUU.

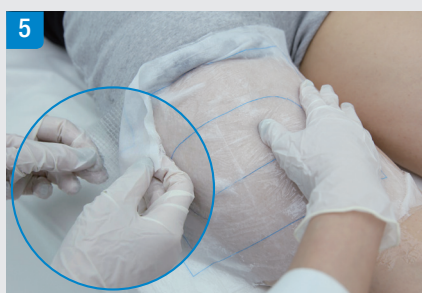

5 הסר את השכבה התחתונה של רשת הפלסטיק מרפידת המגן סוג A של CLATUU.



4 הנח את רפידת המגן סוג A של CLATUU במרכז אזור הטיפול המסומן


רפידת מגן ג'ל 360 של CLATUU - סוג C

- רפידת הג'ל של Classys הינה רכיב חיוני בהליך CLATUU Alpha שכן אושרה על ידי CE ו-KFDA.
- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות, לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר, שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופל העובר את הטיפול.
- חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של Classys על פי ההוראות.




סוג C


רפידת OP
רפידת ג'ל
רשת פלסטיק

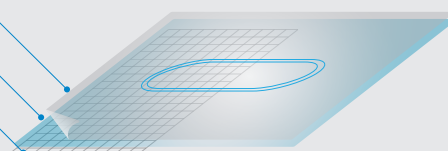

1 פתח את רפידת המגן סוג C של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.

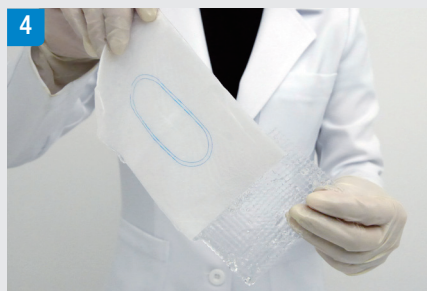

4 פתח את רפידת המגן סוג C של CLATUU וודא כי השכבות שלמות.

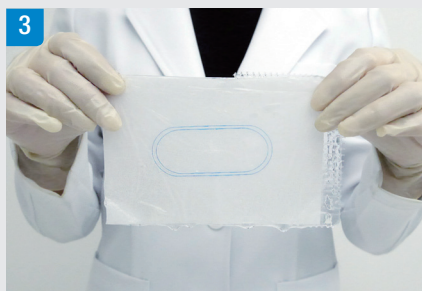

3 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג C של CLATUU מהאריזה.




2 פתח את רפידת המגן סוג C של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



7 התחל בהליך.





6 הנח את המכשיר הידני על אזור הטיפול המסומן.

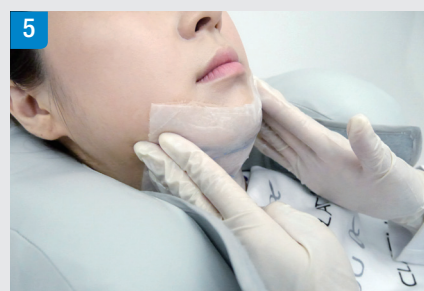

5 הנח את רפידת המגן סוג C של CLATUU במרכז אזור הטיפול המסומן. החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני.

רפידת מגן ג'ל 360 של CLATUU - סוג B

- רפידת הג'ל של Classys הינה רכיב חיוני בהליך CLATUU Alpha שכן אושרה על ידי CE ו-KFDA.
- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות, לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר, שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופל העובר את הטיפול.
- חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקוריות של Classys על פי ההוראות.

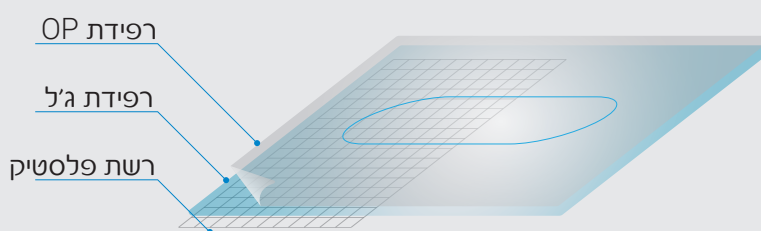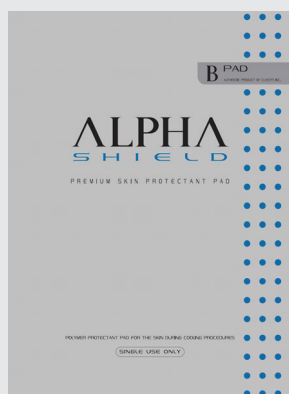

1 פתח את רפידת המגן סוג B של CLATUU וודא כי השכבות שלמות.



2 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג B של CLATUU מהאריזה.



3 פתח את רפידת המגן סוג B של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



4 התחל בהליך.





5 החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני על המרכז המסומן של רפידת מגן סוג B של CLATUU.



6 הסר את השכבה התחתונה של רשת הפלסטיק מרפידת המגן סוג B של CLATUU.

רפידת מגן ג'ל 360 של CLATUU - סוג T

- רפידת הג'ל של Classys הינה רכיב חיוני בהליך CLATUU Alpha שכן אושרה על ידי CE ו-KFDA.
- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות, לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר, שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופל העובר את הטיפול.
- חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של Classys על פי ההוראות.

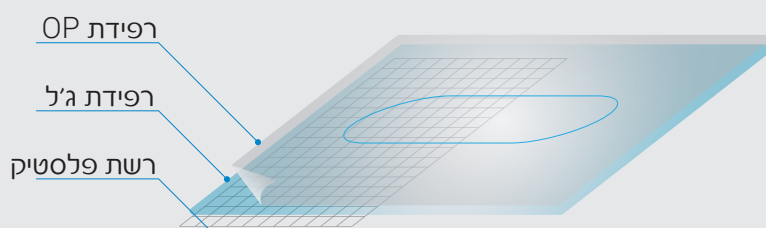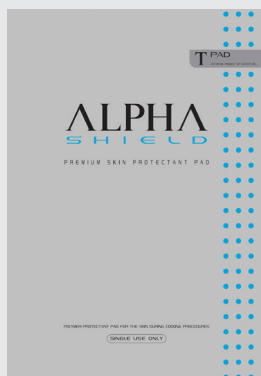

3 פתח את רפידת המגן סוג T של CLATUU וודא כי השכבות שלמות.



2 הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג T של CLATUU מהאריזה.



1 פתח את רפידת המגן סוג T של CLATUU מהחלק העליון של האריזה.



6 התחל בהליך.



5 החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש במכשיר הידני על המרכז המסומן של רפידת מגן סוג T של CLATUU.



4 הסר את השכבה התחתונה של רשת הפלסטיק מרפידת המגן סוג T של CLATUU.


תהליך טיפול- בטן



שאל את הרופא על האזור בו ברצונך לטפל.



מדוד את עובי השומן באזור היעד בעזרת המחווגה. מדוד את היקף הבטן.

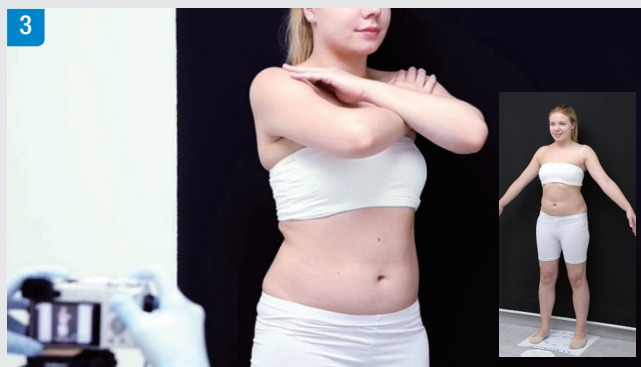

צלם תמונות לפני הטיפול בעזרת מכון מיקום כפות רגליים.



השתמש בתבנית לסימן אזור היעד על פי קאפ הקירור.



חבר את קאפ הקירור למכשיר הידני (יש ללחוץ מטה בחזקה עד הישמע "קליק").



הגדר את הפרמטרים על פי אזור היעד (זמן, קירור, יניקה).

תהליך טיפול- בטן



8 לאחר הנחת קאפ הקירור על אזור היעד, יש להתחיל ביניקת העור.



7 לאחר הסרת רשת הפלסטיק מרפידת המגן, הנח במרכז אזור הטיפול המסומן.



10 כוונן את התאורה בחדר לסביבת טיפול נוחה. הנח שמיכה מעל המטופל לשמירה על טמפרטורת גוף תקינה.



9 וודא כי נמשכה מספיק רקמת שומן לתוך הקאפ, וודא כי רפידת הג'ל נותרה מחוץ לקאפ הקירור. השתמש בכרית לתמיכה בקאפ הקירור ושיפור נוחות המטופל.



12 עסה בעדינות את אזור היעד במשך 2 דקות. הסר שאריות ג'ל במגבת חמה.



11 לאחר השלמת הטיפול, לחץ והחזק את הכפתור במכשיר הידני למשך 2 שניות על מנת לכבות את היניקה. הסר את המכשיר הידני ואת רפידת המגן.

תהליך טיפול - סנטר כפול



מדוד את עובי השומן באזור היעד בעזרת המחווגה.



דבר עם הרופא על האזור בו ברצונך לטפל.



השתמש בתבנית לסימן אזור היעד על פי קאפ הקירור.



צלם תמונות לפני הטיפול בעזרת מכון מיקום כפות רגליים (פנים קדימה, 45° ו- 90°)



חבר את קאפ הקירור למכשיר הידני (יש ללחוץ מטה בחזקה עד הישמע "קליק").



הושב את המטופל על כסא בזווית של 45°

תהליך טיפול - סנטר כפול



הנח את רפידת המגן מסוג C במרכז אזור הטיפול המסומן (החלק בועות אוויר וקמטים מרפידת המגן).



הגדר את הפרמטרים על פי אזור היעד (זמן, קירור, יניקה).



כונן את התאורה בחדר לסביבת טיפול נוחה. הנח שמיכה מעל המטופל לשמירה על טמפרטורת גוף תקינה.



הנח כרית סביב צוואר המטופל. לאחר הנחת קאפ הקירור על אזור היעד, התחל ביניקת העור. וודא כי רפידת הג'ל נשארת מחוץ לקאפ הקירור.



עסה בעדינות את אזור היעד במשך 2 דקות. הסר שאריות ג'ל במגבת חמה.



לאחר השלמת הטיפול, לחץ והחזק את הכפתור במכשיר הידני למשך 2 שניות על מנת לכבות את היניקה. הסר את המכשיר הידני ואת רפידת המגן.

תנוחת טיפול

קאפ



Wing

בטן עליונה ותחתונה



Wing Plus

קו החזייה

גב

"צמיגים"



פנים הירכיים



Flat

בטן עליונה

תנוחת טיפול

קאפ

תנוחת טיפול



סנטר כפול (צד)



צדדי הברכיים

Flat Mini



סנטר כפול (קדמי)



מעל הברכיים

Wing Mini



בתי שחי (קדימה)



בתי שחי (אחורה)

תנוחת טיפול

תנוחת טיפול

קאפ



קדמי



אחורי

Arc-T



צד



פנים

Wing Max



בטן עליונה



בטן תחתונה

תנוחה בטוחה ונוחה למיני קאפים

קאפ

תנוחת טיפול



Wing Mini



Flat Mini

פרמטרים

Wing



זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	3~5

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	3~4

Wing Plus




זמן	קירור	יניקה
40 דקות	5	3~4

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	2~3

פרמטרים

Flat

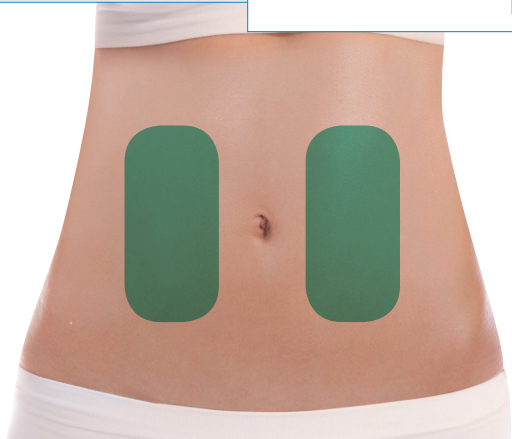

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4	3~4

Flat Mini




זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

פרמטרים

Wing Mini

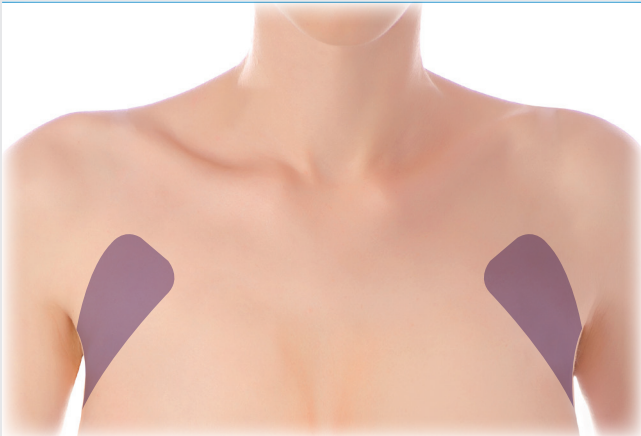

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

זמן	קירור	יניקה
40 דקות	4~5	2~3

פרמטרים

Arc-T



זמן	קירור	יניקה
-----	-------	-------

40 דקות	4	3~4
---------	---	-----

זמן	קירור	יניקה
-----	-------	-------

40 דקות	5	2~3
---------	---	-----

WING MAX



זמן	קירור	יניקה
-----	-------	-------

40 דקות	4	2~3
---------	---	-----

פרטי בטיחות

תופעות לוואי פוטנציאליות

- ציוד זה הינו ציוד קירור טיפולי לא פולשני שניתן ליישם על האור. במכשיר זה לא התרחשו אירועי לוואי חמורים או תופעות לוואי גדולות במהלך המחקר הקליני. הבאים התרחשו במהלך הניסויים הקליניים:
- כאב מתון באזור הטיפול במהלך ההליך.
- חבורות המופיעות באזור המטופל לאחר ההליך (החבורות נעלמות בתוך 4 ימים לאחר ההליך).
- גירוד זמני באזור המושפע.
- היווצרות נוקשות זמנית באזור המושפע.
- יש להקדיש תשומת לב רבה שכן מטופלים עשויים לחוות כאבים מתונים, כוויות קור, גלדים וחוסר תחושה זמני בעצבים לאחר ההליך.
- תחושת גודש בגרון לאחר טיפול הכולל את אזור הצוואר או הסנטר.

תלונות ואירועי לוואי

- לא התרחשו תופעות חמורות או שליליות מהשימוש במכשירים זהים קודמים ביחס למחקר הקליני.
- Classys Inc ממלאת את חוקי MDR (דיווח על מכשירים רפואיים) לטיפול בתלונות ואירועי לוואי. במידה ויש חשד או דיווח על אירוע לוואי, אנא צרו קשר עם Classys Inc.

שאלות ותשובות

מהי תגובה רגילה לאחר הליך CLATUU Alpha?

- לאחר שהטיפול מסתיים, ייתכן כי האזור יהיה רך או נוקשה. חלק מהמטופלים יראו אדמומיות באזור המטופל, אך היא בדרך כלל נעלמת תוך כמה שעות. המטופלים חופשיים לעסוק בפעילויות רגילות מיד לאחר הטיפול.

לאילו תוצאות יש לצפות מטיפול CLATUU Alpha?

- מטופלים בדרך כלל אמורים לראות שיפור משמעותי באזור המטופל לאחר 6 שבועות. תאי השומן הנותרים ממשיכים להיעלם בהדרגה מהגוף, מה שמוביל להפחתה נוספת בשומן. ניתן לראות את מלוא התועלת מהטיפול לאחר 90 יום, כאשר בשלב זה המטפל יכול לקבוע האם יש צורך בטיפול נוסף.

מהי אפופטוזה?

- אפופטוזה היא תהליך של מוות תאים מתוכנת (PCD), המתרחש באורגניזמים מרובי תאים. אירועים ביוכימיים מובילים לשינויי תא אופייניים (מורפולוגיה) ולמותם. תאים אחרים מנקים את התאים המתים ולא משאירים להם זכר בגוף.

מה גודל האזור המטופל הסביר כי יצטמצם?

- מחקרים מראים כי סשן אחד (שימוש בקאפ אחד) יכול לצמצם את הגודל בעד 1 ס"מ. בהתחשב בכך של-CLATUU Alpha יש 2 קאפים, ניתן לצמצם את הגודל בעד 2 ס"מ בבת אחת.

כמה זמן לוקח טיפול CLATUU Alpha?

- טיפול CLATUU Alpha לוקח 40-60 דקות. על המטפל לקבוע את הזמן והרמה של הליך CLATUU Alpha על פי אזור היעד. המטופל יכול לנוח, לישון, לקרוא או להקשיב למוזיקה בתנוחה נוחה במהלך הטיפול. חשוב שלא לחרוג מזמן הטיפול המומלץ.

כמה טיפולים נדרשים?

- תלוי בעובי השומן. ניתן לחזור על טיפול CLATUU Alpha באותו אזור במרווחים של 30 יום.

למה המטופל יכול לצפות במהלך ההליך?

- התחושה הראשונית היא שהעור נמשך לשואב. ב-10 הדקות הראשונות, תהליך הקירור עשוי לדקור או לחוש לא נוח. לאחר מכן, האזור קר ורדום. כשהקאפ מוסר, האזור המטופל יהיה קר וקשה. עיסוי לאחר הטיפול מסייע במיטוב התוצאות.

כמה בטוח הליך CLATUU Alpha?

- CLATUU Alpha עבר אלפי שעות בדיקה. קירור מבוקר הוכח כפוגע בתאי שומן בלבד. CLATUU Alpha דורש שימוש ברפידת ג'ל המסופקת על ידי Classys, שכן הינה חיונית להגנה על השכבות העליונות של העור.

כמה זמן לוקח להתאושש לאחר טיפול CLATUU Alpha?

- טיפול CLATUU Alpha הינו טיפול לא פולשני ולא כירורגי, כך שברוב המקרים, המטופלים יכולים לחזור לשגרתם הרגילה לאחר הטיפול.

לאחר הטיפול

1. המלצות לטיפול לאחר ההליך

- לאחר הסרת הקאפ, האזור המטופל יהיה קר.
- עיסוי: לאחר 40-60 דקות, הטיפול יושלם והמכשיר הידני יוסר. האזור המטופל יהיה נוקשה מיד לאחר ההליך. עיסוי יכול למטב את תוצאות הטיפול ובנוסף, הוא מסייע להפחית את הנוקשות, את תחושת הקור והאדמומיות.
- בהשוואה לשאיבת שומן, הליך CLATUU Alpha הינו לא פולשני, ובדרך כלל לא נדרשים הרדמה או משככי כאבים. זמן התאוששות או צלקות אינם סבירים.
- לא ניתן לראות הבדל במצבורי השומן מיד לאחר הטיפול. בערך חודש לאחר הטיפול, המטופל יראה הפחתה גלויה של שומן באזור המטופל.

2. תכנון טיפול CLATUU Alpha נוספים

טיפולים נוספים יכולים לייסע להשיג את התוצאה המבוקשת. לאחר 30 יום, ניתן לטפל שוב באותו אזור. בעת תכנון טיפול שני באותו אזור, מומלץ להתאים אישית את התכנית, להחליף קאפים ולשנות במעט את המיקום.

3. מקום תועלות הטיפול

על המטופלים לצפות לאי נוחות קלה לאחר ההליך. המטופלים יכולים לחזור לפעילויות הרגילות שלהם מיד לאחר ההליך. יש לעודד את המטופלים לשמור על אורח חיים בריא של דיאטה והתעמלות לאחר הטיפול. על המטופלים להימנע משימוש בתרופות אנטי דלקתיות כמו איבופרופן, נפרוקסן במשך 6 שבועות לאחר הטיפול. על המטופלים לקבוע בדיקת מעקב רפואית לסקירת התוצאות הקליניות ודין בדעות.

4. תגובה תקינה לעומת תופעות לוואי

קור: במהלך הליך CLATUU Alpha, המטופל יחוש חוסר נוחות מתון ב-10 הדקות הראשונות, אשר יופחת בקביעות כשהרקמה הופכת רדומה מהקאפ הקר.

אדממת (אדמומיות): ייתכן כי האזור המטופל יראה אדממת מיד לאחר הטיפול, אשר עוברת בדרך כלל תוך יום מהטיפול.

חבורות: חבורות קלות, שנגרמו מהניקה החזה לכלי הדם ברקמות הרכות עשויות להופיע מידי פעם ובדרך כלל נעלמות בתוך 2-3 שבועות מהטיפול.

חוסר נוחות: ייתכן כי יחוו חוסר נוחות ב-10 הדקות הראשונות של ההליך.

חוסר תחושה: המטופל עשוי לחוות חוסר תחושה זמני באזור המטופל. זה עשוי להתרחש בעד 2-4 שבועות לאחר ההליך.

תחושת גירוד: ייתכן גירוד קל באזור המטופל אשר עשוי להימשך 2-4 שבועות לאחר ההליך.

נוקשות: ייתכן כי עור המטופל יהיה רגיל למגע לאחר ההליך. זוהי תגובה רגילה וזמנית.

ניקוי הצינור


מומלץ לנקות את הצינור פעם ביום לאחר שימוש במערכת CLATUU Alpha.

- לוקח כ-5 דקות לנקות כל צינור (יש לעצור את הניקוי כשהצינור נקי לגמרי משמן וממשקעים אחרים).
- אם ניקוי הצינור לא מבוצע לעיתים תכופות, השמן ברכיב עשוי להתקשות ולמנוע מיניקת המכשיר הידני לתפקד כראוי.
- לאחר ניקוי הצינור, השתמש באוסף שמן לניקוז השמן ממעמד הזרוע בעת הצורך.

לחץ על כפתור ההגדרות הממוקם בפינה הימנית העליונה של הממשק.



כאשר מעמדי הזרועות A ו-B מוצגים כאפשרויות מלבד ניקוי הצינור בהגדרות, לחץ על STANDBY לכל אחד מהם על מנת לנקות את הצינור באופן נפרד או מקביל (משך כ-5 דקות).

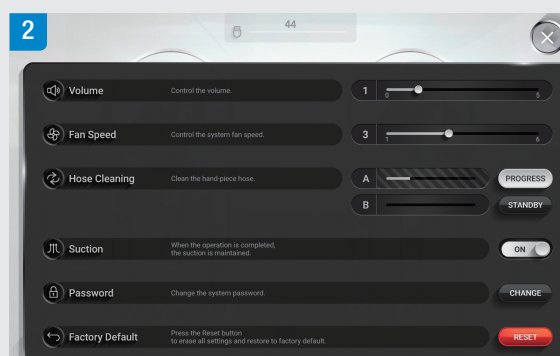

כאשר מעמדי הזרועות A ו-B מוצגים כאפשרויות מלבד ניקוי הצינור בהגדרות, לחץ על STANDBY לכל אחד מהם על מנת לנקות את הצינור באופן נפרד או מקביל (משך כ-5 דקות).



ניקוי שמן


- בצע כשהודעת שגיאה מוצגת כמתואר.
- וודא כי כיבית את המערכת טרם הביצוע.
- המתן 10-15 דקות, עד שכ-200 מ"ל שמן ינוקזו לגמרי מהמערכת.



3 יישר והכנס את מחבר אוסף השמן לפתח.




2 התכונן לחבר את אוסף השמן לפתח.

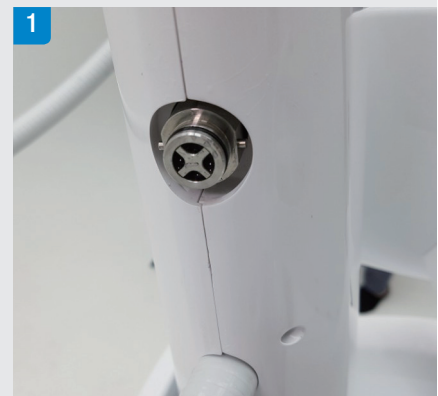

1 בדוק את פתח אוסף השמן הממוקם מאחורי מעמד הזרוע.



5 בדוק כי השמן מנוקז היטב דרך מחבר אוסף השמן. השאר את אוסף השמן מחובר עד שהשמן נוקז לגמרי מהמערכת. לאחר ניקוז מוצלח, הוצא את אוסף השמן ממעמד הזרוע בסדר הפוך

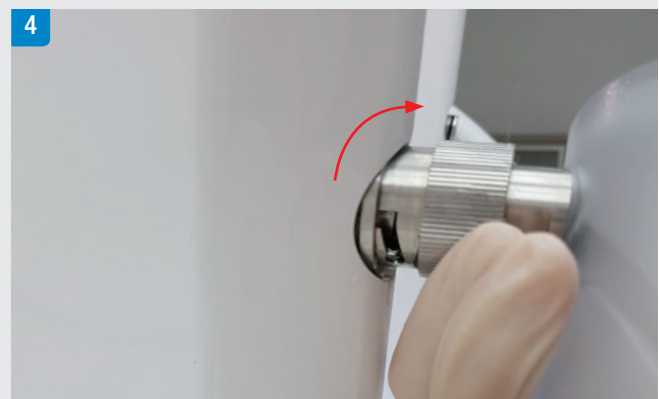


4 לאחר הכנסת מחבר אוסף השמן לפתח, סובב את המחבר ימינה להבטחת חיבור חזק.

הזרמת מים

פתחי VENT (עליון) ו-DRAIN (תחתון) ממוקמים בחלק האחורי התחתון של הגוף הראשי. מכסה המסנן להכנסת מים ממוקם בחלק העליון של הגוף הראשי.

הכנס את צינור הפלסטיק לפתח VENT כאשר הקצה השני מונח במכל.

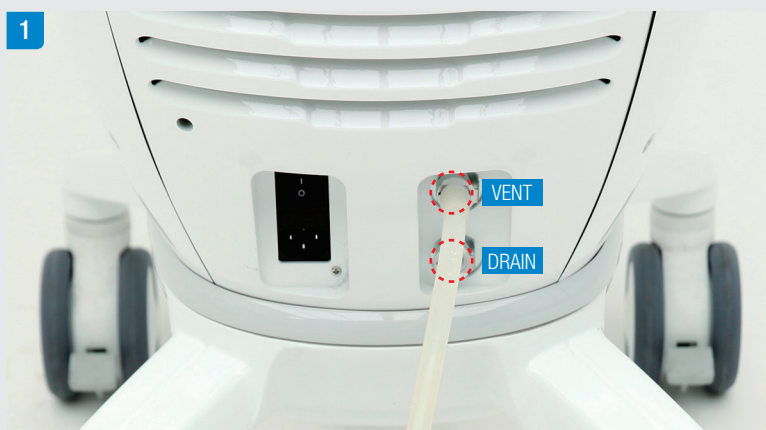

מזוג כ-2 ליטרים של מים למסנן עד שהמים יוצאים מפתח VENT ולתוך המכל.



לחץ על כפתור השחרור הממוקם לצד פתח VENT והוצא את צינור הפלסטיק.



להנחיות ושאלות נוספות אודות מערכת CLATUU Alpha, עיין בחומרי הדרכה נוספים לשימוש הולם
ומקצועי ב- CLATUU Alpha.

-מדריך התקנה

-מדריך תפעול מקוצר

-מדריך תפעול

-מדריך טיפול

לשאלות נוספות, צור קשר:

info@classsys.com

TREATMENT GUIDE

Manufacturer CLASSYS Inc.

Tel +82-2-517-2114 **Fax** +82-2-6008-3457

Website www.classys.com **E-mail** info@classys.com