

Freeze ON Fat OFF



CLATUU 

No Limitations

תוכן עניינים

רכיבים ומאפיינים

התקנה

1. התקנת מוניטור
2. חיבור מעמדי הזרועות
3. חיבור קאפ קירור
4. הכנסת מים
5. חיבור כרטיס SAT
6. הפעלת המערכת
7. ניקוז שמן

רכיבים ומאפיינים




גוף ראשי



מעמד זרוע (X2)



מוניטור

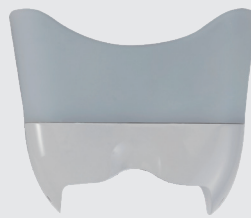

קאפ קירור סוג WING
(אופציונלי (X2)




אוסף שמן



כבל חשמל AC



ברגים (X4)

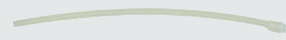

צינור פלסטיק




משפך

1. התקנת המוניטור


מוניטור CLATUU Alpha מתחבר לחלק העליון של הגוף הראשי כשהוא פונה החוצה.



בדוק כי המוניטור מחובר היטב
כפי שרואים מהחלק האחורי של
הגוף הראשי

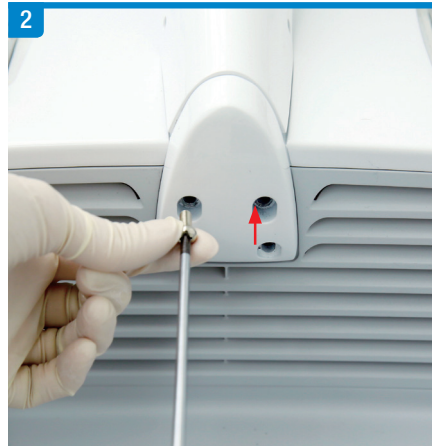

הכנס את ארבעת הברגים
לשקעים בבסיס המוניטור

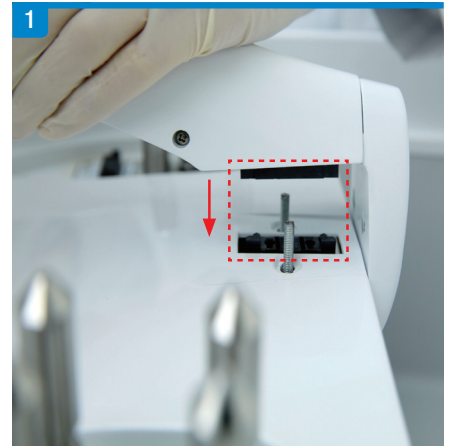


יישר את המחברים של שני
הרכיבים ולחץ מטה את המוניטור

2. חיבור מעמדי הזרועות

מעמדי זרועות ה- CLATUU Alpha מתחברים ליציאות הממוקמות בקצוות הנגדיים בחלק העליון של הגוף הראשי. כל מעמד זרוע פונה החוצה מהגוף הראשי ויוצרים V לאחר חיבור מוצלח.



1 כבל המכשיר הידני מתחבר מבסיס מעמד הזרוע

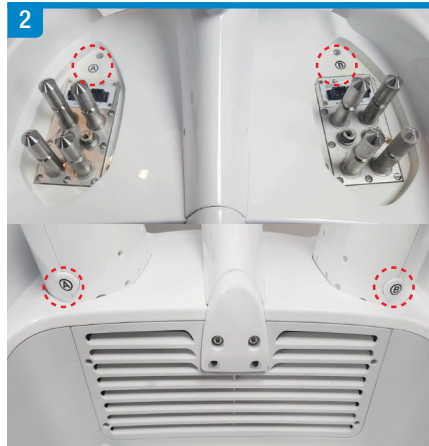

2 שני מעמדי הזרועות והיציאות מסומנים כרכיבים A ו-B



3 כל מעמד זרוע מתחבר לשקע באותו סימון לתפקוד הולם של המכשירים הידניים במהלך הטיפול



4 יישר את מחברי שני הרכיבים ולחץ מטה בחוזקה עד הישמע "קליק"




5 לחץ על הכפתור בחלק העליון של כל מעמד זרוע לכוונן אורך כבל המכשיר הידני

3. חיבור קאפ קירור

המכשיר הידני מחליף את קאפי הקירור לביצוע הטיפול על העור.



1 כבל המכשיר הידני מתחבר לבסיס מעמד הזרוע

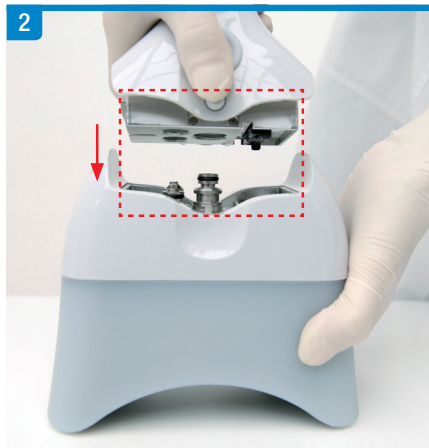


2 יישר את מחברי שני הרכיבים ולחץ מטה בחוזקה עד הישמע "קליק"



3 בדוק כי קאפ הקירור מחובר היטב על מנת לוודא שלא יתנתק או לא יתפקד במהלך הטיפולים

4. הכנסת מים

פתחי VENT (עליון) ו-DRAIN (תחתון) ממוקמים בחלק האחורי התחתון של הגוף הראשי. מכסה המסנן להכנסת מים ממוקם בחלק העליון של הגוף הראשי.

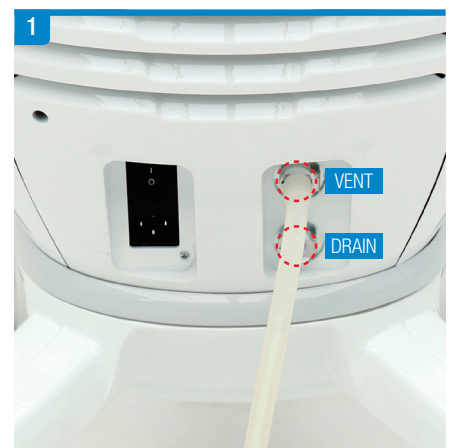

1 הכנס את צינור הפלסטיק לפתח VENT כאשר הקצה השני מונח במכל




2 מזוג כ-2 ליטרים של מים למסנן עד שהמים יוצאים מפתח VENT ולתוך המכל



3 לחץ על כפתור השחרור הממוקם לצד פתח VENT והוצא את צינור הפלסטיק

5. חיבור כרטיס SAT

The SAT Card connects to the Main Body, providing memory to the System that enables all treatment functions of the CLATUU Alpha.

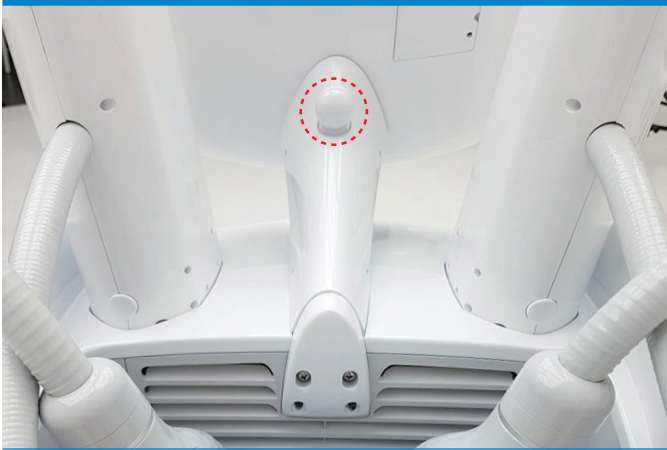

הכנס את כרטיס ה-SAT ליציאת ה-USB בצוואר המוניטור טרם ביצוע הטיפול



אזהרה!


הכנסת כרטיס ה-SAT לכל מכשיר אחר או הכנסת כבל USB אחר ליציאת ה-USB של כרטיס ה-SAT עלול לגרום לתקלות.

6. הפעלת המערכת

מתג החשמל AC ממוקם בחלק האחורי התחתון של הגוף הראשי עם כפתור הפעלה מתחת למוניטור.



המתן כ-5 שניות עד שהמערכת תעלה את ממשק המשתמש הגרפי (GUI) הראשי

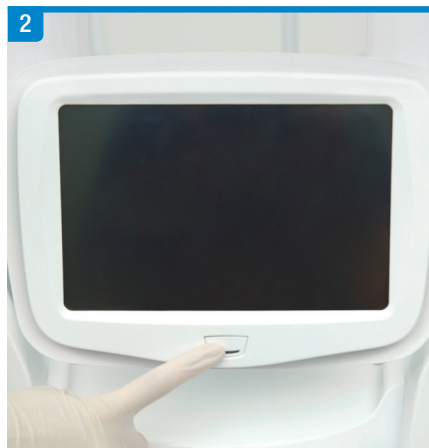


לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המערכת



לאחר חיבור כבל חשמל ה-AC לגוף הראשי ולמקור חשמל מוארק, לחץ על סמל I במתג החשמל AC

7. ניקוז שמן


בצע כשהודעת שגויאה מוצגת כמתואר.
וודא כי כיבית את המערכת טרם הביצוע.
המתן 10-15 דקות, עד שכ-200 מ"ל שמן ינוקזו לגמרי מהמערכת.

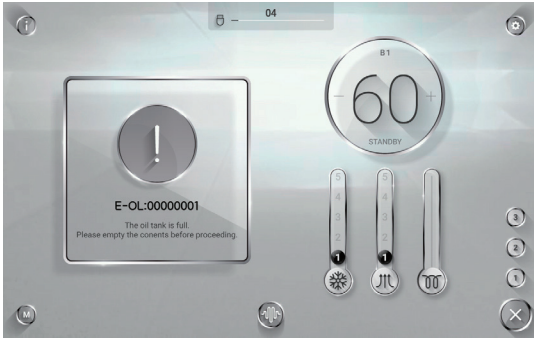

3 יישר והכנס את מחבר אוסף השמן לפתח



2 התכונן לחבר את אוסף השמן לפתח

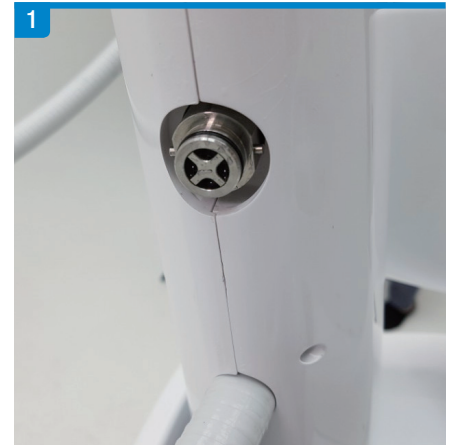

1 בדוק את פתח אוסף השמן הממוקם מאחורי מעמד הזרוע



5 בדוק כי השמן מנוקז היטב דרך מחבר אוסף השמן. השאר את אוסף השמן מחובר עד שהשמן נוקז לגמרי מהמערכת. לאחר ניקוז מוצלח, הוצא את אוסף השמן ממעמד הזרוע בסדר הפוך.



4 לאחר הכנסת מחבר אוסף השמן לפתח, סובב את המחבר ימינה להבטחת חיבור חזק