

ulfit

מערכת אולטימטיבית להרמה
ומיצוק עור הפנים והגוף



הרמה, מיצוק והידוק

Introduction

Table of Contents

Introduction

- ULFIT System
- ULFIT Cartridges
 - F7-1.5: 1.5mm
 - F7-3.0: 3.0mm
 - F7-4.5: 4.5mm
 - B2-6.0: 6.0mm
 - B2-9.0: 9.0mm
 - B2-13.0: 13.0mm

Precautions for Treatment

- Contraindications
- Preferred Patient Selection
- Potential Side Effects
- Precautions
- Patient Consultation
- Pain Management
- Avoiding Nerves

Treatment

- Preparation for Treatment
- Precautions for Face & Body Procedures
- Treatment Steps for Face & Décolleté
- Parameters for Face & Décolleté
- Treatment Steps for Body
- Inspecting the Body Cartridge
- Parameters for Body

ulfit

טיפול

ההנחיות ואמצאי הזהירות הבאים להלן מיועדים לביצוע שיטות פרוצידורליות תקינות על המטופל עם הגוף והמערכת הראשיים של ULFIT. עיין בהראות אלה לטיפולים בטוחים ומוצלחים עם ה-ULFIT.



מערכות ה-ULIFT



מכשיר ה- ULFIT אינו פולשני, למיצוק הפנים ושיפור מראה העור.
פרוטוקול טיפולים אישי באזורי הפנים, צוואר וגוף.
המכשיר מתמקד בשתי מחסניות מעגליות ממוקדות ומיקרו ממוקדות באמצעות HIFU.
אנרגיית אולטראסאונד אחידה ותמידית המשררה קרישה תרמית בפנים והתכווציות בגוף.

מחסניות ה-ULIFT

מחסניות פנים וגוף

מחסניות המופעלות באמצעות מיקרו-אולטראסאונד ממוקדות מיועדות לכוון לאזורים רדודים יותר להרמה והידוק מספר שכבות בפנים.

מחסניות אולטרה-סאונד ממוקדות מאקרו ממוקדות לטיפול באזורים העבים יותר של הגוף להפחתת שומן ומתאר הגוף.



F7-1.5 : 1.5mm



F7-3.0 : 3.0mm



F4-4.5 : 4.5mm



B2-6.0 : 6.0mm



B2-9.0 : 9.0mm



B2-13.0 : 13.0mm

אמצעי זהירות לטיפול

אמצעי זהירות למטופל

יש לקבוע האם הטיפול מתאים למטופל עם התנאים הבאים:

- טיפול נוגד קרישה
- מצבי עור הנגרמים על ידי מחלות אוטואימוניות,
- סרטן העור והרפס סימפלקס
- סוכרת או אפילפסיה
- מחלות עור קשות
- דקורטציה או מחלות לב
- רגישות יתר או צלקות היפרטרופיות
- תפקודים HEMOSTATIC

אמצעי זהירות

יש להימנע מסכנות בטיחות המתרחשות במהלך הטיפול עם מכשיר ה- ULFIT:

- אין לטפל במכשיר ה- ULFIT ללא קבלת הדרכה.
- כדי למנוע שימוש בלתי מורשה במכשיר, ודא שהגישה היא מוגבלת אך ורק לאנשים מיומנים ומוסמכים בלבד.
- הימנע מטיפול באזורים גרמיים (עור דק וקרוב לעצם) או באזורי עצבים.
- אם מתרחשות תקלות או אירועים שליליים, יש לעצור מייד הליך הטיפול.
- יש למרוח תמיד ג'ל אולטרסאונד על אזורי המטרה.
- לפני ביצוע צילומים, בדוק כי המחסנית מחוברת והמתמר במגע מלא על העור כראוי.
- אם המחסנית החלה יותר מאלף יריות רצופות, יש להחליף מחסניות או לאפשר למחסנית להתקרר לפני המשך טיפול נוסף.
- יש להימנע מטיפול בבלוטת התריס, סחוס בלוטת התריס וקנה הנשימה.
- הימנע מטיפול ישירות על רקמת השד ובעיקר על כלי דם.

התוויות נגד

השימוש ב- ULFIT לשימוש ב-חולים עם:

- הריון או בזמן הנקה
- פצעים או נגעים פתוחים באזור הטיפול
- אקנה חמור או ציסטתי באזור הטיפול
- סטנטים ממתכת / שתלים חשמליים באזור הטיפול
- שתלים מכניים נספגים ביו
- דלקות עור מכל סוג
- הפרעות או בעיות בתפקוד שטף דם

בחירת מטופל מועדף:

מטופלים העומדים בדרישות הבאות איתם נשיג תוצאות גדולות יותר:

- מטופלים עם כמות מספקת של תאי שומן עיקשים באזור הטיפול
- אין צלקות גדולות או קפלי עור מיותרים באזור הטיפול
- עור עדין עד בינוני עם רפיון ברקמות רכות
- עור, יבש, נפול ומקומט מאוד
- מטופלים עם קו גבה נפול, עור נפול, קווים דקים או קמטים

תופעות לוואי פוטנציאליות

מטופלים אשר יטופלו במכשיר ה- ULFIT עשויים להגיב לתגובות קלות וזמניות כדלהלן:

- בצקת (נפיחות)
 - אריתמה (אדמומיות)
 - רוך
 - סימון
 - הצטלקות
 - חוסר תחושה או עקצוץ חולף
- * על הרופא או המטפל המקומי להתייעץ עם המטופל כל היסטוריה של כאבים חזקים או אי נוחות קלה שעוברת אקטואלי, טיפולים לא פולשניים כולל ה- ULFIT.

אמצעי זהירות לטיפול

טיפול בכאב

למטופלים המדווחים על רגישות גבוהה יותר לכאב, נמליץ על הדברים הבאים במהלך ההליך:

- הרדמה מקומית או אלחוש מקומי
- תרופות נגד כאבים דרך הפה
- קרם מקהה מקומי-אלחוש מקומי
- * אין צורך בתרופות נוספות לכאב לאחר הטיפול.

הימנעות ממקומות עצביים

אזורי עצביים שיש להימנע מהם במהלך הטיפול:

- טבור
- עמוד השדרה העליוני האחורי (PSIS)
- עצבי האגן
- עצבים של אולנאר
- עצבים SCIATIC
- עצבים מנדבולריים שוליים
- עצבי פנים זמניים
- עצבי פנים לעור-מוח
- * אם המטופל חווה תחושות כאב או עקצוצים מופרזים באזור יעד ספציפי, עצור את ההליך והמשך לשלב הבא.
- * התאם אישית פרמטרים על פי רגישות וסבילות של המטופל.

אמצעי זהירות לבטיחות המערכת

כדי להבטיח את בטיחות המערכת ותחזוקה נאותה של מכשיר ה- ULFIT:

- לפני השימוש במכשיר על מנת למנוע סכנת התחשמלות, יש לבדוק תמיד את המחסנית, הידית וכבל החשמל.
- אל תשתמש בכבל או במחסנית שנפגעו או דולפים ונוזלים.
- אל תסיר את הכיסויים של גוף הראשי או חלקי הידית של מכשיר ה- ULFIT - אסור לשנות ציוד זה.
- מכשיר ה- ULFIT אינו מכיל רכיבים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.
- צרו קשר עם המפיץ מקומי או נציג CLUEDERM אם המערכת דורשת זאת שירות.
- אל תתכופף מעל הציוד באופן אלכסוני ואל תיתן פיזית הלם חיצוני לציוד מכיוון שהוא עלול לגרום למערכת נזק.
- אין להחזיק בסמוך למכשיר ציוד עם גזי הרדמה או חומרים דליקים.
- * לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של ULFIT.

ייעוץ למטופלים

להערכה מדויקת של תוכנית המטופל:

- בדוק את ההיסטוריה הרפואית של המטופל.
- בדוק אם קיימים ניתוחים שנערכו בעבר על פי ההצעה לאזורי טיפול.
- התייעץ עם מטופלים לגבי רמות סובלנות הכאב שלהם כדי להתאים מתן תרופות נגד כאבים.
- תיאום טיפולים בהתאמה אישית עם המטופל.



חובה למרוח ג'ל אולטרא סאונד על איזור הטיפול.
יש להיות במגע מלא עם הידית על העור



אין למרוח כמות עודפת של אולטראסאונד ג'ל כדי למנוע הצטברות נוזלים מלהיכנס לתוך החלק האחורי של גוף הידית ולגרום לקצר.

הכנה לטיפול



כפפות



ג'ל אולטרא סאונד



נייר ניגוב

1. נקה את האזור שיש לטפל בו.
2. סמן קווי מתאר באזורי היעד לפי תוכנית הטיפול המיועדת.
3. בדוק את מצב המחסניות.
4. יש להקפיד למרוח כמות מספקת של ג'ל אולטראסאונד באזורי המטרה לפני שתמשיך בטיפול.

אמצעי זהירות להליך טיפול בפנים וגוף

◦ אמצעי זהירות להליך טיפול בפנים וגוף:

- אין לבצע טיפול באזורים הגרמיים ובאזורים עצביים
- אין לבצע טיפול ישירות על הטבור, עמוד השדרה העליתי האחורי האחורי (PSIS), אגן, אגן או עצבים sciatic.
- כאשר מטפלים באזורי הגוף יש לבצע טיפול אחד בצד בכל פעם לפני שתמשיך לאחר.
- כאשר מטפלים במחסנית הגוף, יש לטפל במהירות איטית לקצב מהיר יחסית.
- הימנע מטיפול בנקודות ספציפיות שעלולות לעורר תחושות עקצוצים אצל המטופל.
- לאחר יישום מספר יריות בדוק אם יש תגובות בעור, רמת הרגישות של המטופל.

◦ המשך לטיפול או הפחתת פרמטרים בהתאם לרמת הסבילות של המטופל.

- יש להקפיד תמיד על חלוקה שוטפת של יריות על אזור הטיפול המסומן.
- על המטופל לעמוד בתקנים של כל גוף מחסנית על בסיס בדיקת הצביטה ואזור הטיפול להיות ממוקד:
 - B2-6.0: עומק של לפחות 1.2 ס"מ
 - B2-9.0: עומק של לפחות 1.8 ס"מ
 - B2-13.0: עומק של לפחות 2.5 ס"מ

◦ אמצעי זהירות לטיפול פנים ואיזור הדקולטה

- אין לבצע טיפול באזורים הגרמיים ובעצב אזורים.
- אין לבצע טיפול ישירות באזור השד, עצם הברית, העל-סופרביטאלי, הזמני או השולי עצבים דלקת.
- כאשר מטפלים באזורי פנים יש לטפל תחילה בצד אחד בכל פעם לפני שתמשיך לצד השני.
- אין לבצע צילומים באותו אזור טיפול ברצף.
- הימנע מיישום טיפול בנקודות ספציפיות שעלולות לעורר תחושות עקצוצים אצל המטופל.
- לאחר יישום מספר יריות בדוק אם יש תגובות בעור ואת רמת הרגישות של המטופל. המשך לטיפול או הפחתת פרמטרים בהתאם לרמת הסבילות של המטופל.
- הקפידו לבצע תמיד חלוקה שוטפת של יריות על אזור הטיפול המסומן.
- כאשר מטפלים בשכבות מרחבות יש לטפל מעומק עד רדודים בסדר רצף כדלקמן:
 - לדוגמא: 4.5 מ"מ ◀ 3.0 מ"מ ◀ 1.5 מ"מ

* שימו לב כי סמל "/" בפרמטרים מציין צילומים לכל צד בגוף.

⚠ כשאתה מטפל עם מחסניות פנים וגוף במצב יריות חוזר, יש להקפיד לשמור על המחסנית תמיד במעבר.

⚠ כשאתה מטפל עם מחסניות פנים וגוף במצב ירייה יחידה, הקפד לשמור על המחסנית במצב נייח בעת החלת יריות.

אופן הטיפול

שלבי טיפול לפנים ודקולטה

1. הפעלת המערכת למצב ON

לחץ על סמל ז' שבמתג ההפעלה AC ולחץ על מתג ההפעלה מול הגוף הראשי כדי להפוך את המערכת לפועלת.

2. בחירת מחסנית:

בחר את מחסנית הפנים על סמך הערכת המטופל ואזור הטיפול הממוקד:

1.5: F7-1.5 מ"מ

3.0: F7-3.0 מ"מ

4.5: F4-4.5 מ"מ

3. בדיקת המחסנית

בדוק תמיד את המצב הגופני של המחסנית וכי אין שאריות שאריות של ג'ל אולטראסאונד או לפני שתמשיך בטיפול.

4. מריחת ג'ל אולטראסאונד

מרחו כמות מספקת של ג'ל אולטראסאונד על אזור הטיפול כחומר סיכה בין הידית לבין העור במהלך ההליך. יש להקפיד למרוח שוב כמות מספקת של ג'ל במידת הצורך.

5. טוען את ממשק הידית

הסר את הידית מהמתקן שלה, המכשיר יזהה אוטומטית את הפעולה יטען את ממשק המשתמש הגרפי (GUI) לממשק חתיכות היד שלו בהתאמה.

6. הגדרת פרמטרים והעדפות

הגדר את הפרמטרים וההעדפות בממשק המשתמש הגרפי (GUI) ולחץ על READY.

ניתן להתאים אישית את ההגדרות הבאות:

- זרימת אנרגיה

- גובה הצליל

- מצב ירייה יחידה / חוזרת

- אזעקה

- טיימר

- עוצמה

* לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של ULFIT.

7. טעינת הידית

הנח את ידית הפנים השטוחה על אזור הטיפול ולחץ על כפתור הצילום כדי לפלוט אנרגיית אולטראסאונד.
* לפרטים נוספים על הימנעות מאזורים גרמיים ואזורי עצבים בעת יישום ULFIT פיסת היד במהלך טיפול, עיין באמצעי זהירות ספציפיים שמתחת לכל פרק טיפול ו'הזהירות לפנים ודקולטה'נהלים של מדריך טיפול זה.

מצב פולס בודד

- מצב SHOT SINGLE דורש לחיצה על כפתור
ה- SHOT לכל ירייה המיושמת.

⚠ אין ליישם אנרגיית אולטראסאונד על גבי אותו
איזור טיפול ברציפות.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הפנים,
לחץ על STANDBY בממשק המשתמש הגרפי (GUI).

⚠ כאשר מטפלים עם מחסנית הפנים במצב פולס
בודד, הקפד לשמור על המחסנית במצב נייח בעת
החלת הפולסים.

מצב פולסים חוזרים

- מצב פולסים חוזרים מחייב לחיצה ממושכת על
הטריגר ליישום רציף.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הפנים
בזמן

במצב פולסים חוזרים, שחרר את האצבע שלך
מהטריגר כדי להפסיק את יציאת הפולסים

והמשך ללחוץ על STANDBY על הממשק משתמש
הגרפי (GUI).

⚠ כאשר מטפלים במחסנית הפנים בפולסים חוזרים
יש להקפיד לשמור על המחסנית תמיד בתנועה ולא
להישאר במקום.

9. ניקוי המחסנית והידית:

נגב את המחסנית במשטח הכנת אלכוהול איזופרופיל רגיל של 50-70% לפני שמכניסים חזרה למתקן המחזיק את הידית.

10. ניקוי אזור הטיפול


נגב את אזור הטיפול עבור כל ג'ל אולטראסאונד שנותר עם רטיות רטובות או כריות כותנה.

אופן הטיפול


שלבי טיפול לפנים ודקולטה

דקולטה


[● 4.5mm]

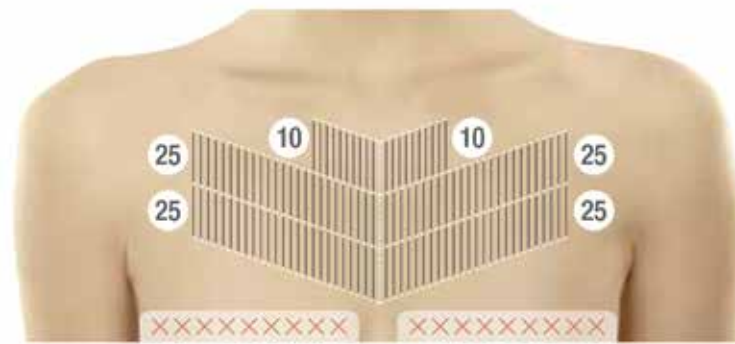

[● 3.0mm]

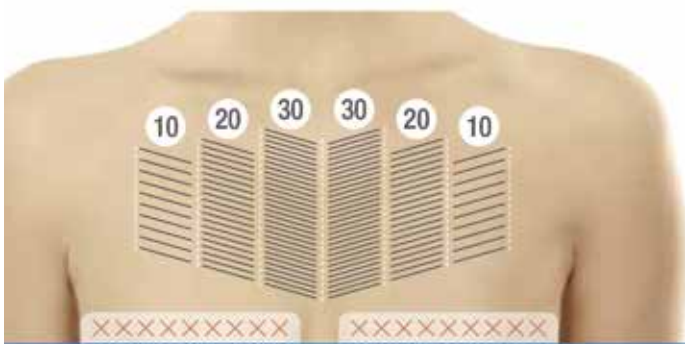

[● 1.5mm]

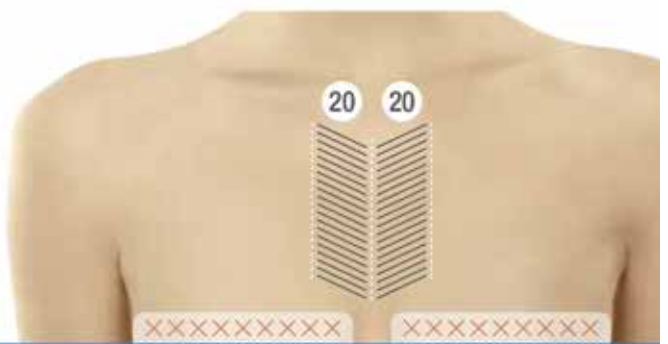

מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים	פולסים
● 4.5mm	0.2-0.4J	1.0-1.5mm	1	120
● 3.0mm	0.2-0.4J	1.0-1.5mm	1	120
● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	1	40


- אין לבצע טיפול ישירות על שתלי עצם הבריה, רקמת השד או השד.
- כאשר מטפלים בשכבות מרחבות, יש לטפל מעומק לרדוד לפי סדר רצף.
- לדוגמא: 4.5 מ"מ ◀ 3.0 מ"מ ◀ 1.5 מ"מ
- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.
- *להלן המלצות לטיפול באזורי היעד של דקולציה.

אופן הטיפול

צוואר וקו הלסת

[● 4.5mm ● 3.0mm]

[● 1.5mm]

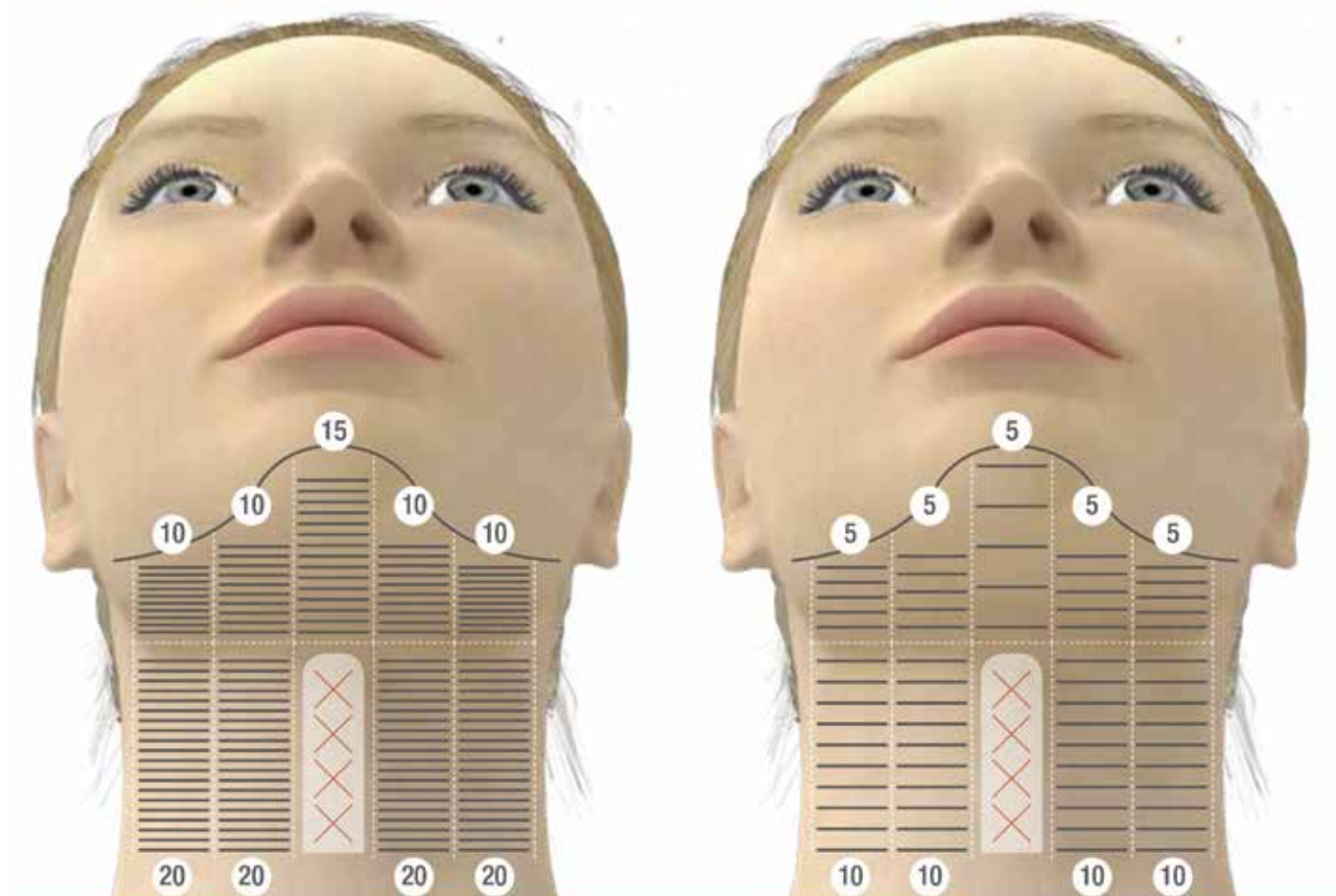

מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים	פולסים
● 4.5mm	0.4-0.6J	1.0-1.5mm	1	135
● 3.0mm	0.3-0.5J	1.0-1.5mm	1	135
● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	1	65


- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב המונדבולורי השולי.
- אל תפעיל לחץ יתר על הצוואר כדי למנוע אי נוחות במהלך הטיפול.
- כאשר מטפלים בשכבות מרובות, יש לטפל מעומק לרדוד בסדר רצף.
לדוגמא: 4.5 מ"מ ◀ 3.0 מ"מ ◀ 1.5 מ"מ
- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.
*להלן המלצות לטיפול באזורי המטרה בצוואר.

אופן הטיפול

צוואר וקו הלסת

[● 4.5mm ● 3.0mm ● 1.5mm]

[● 4.5mm ● 3.0mm]

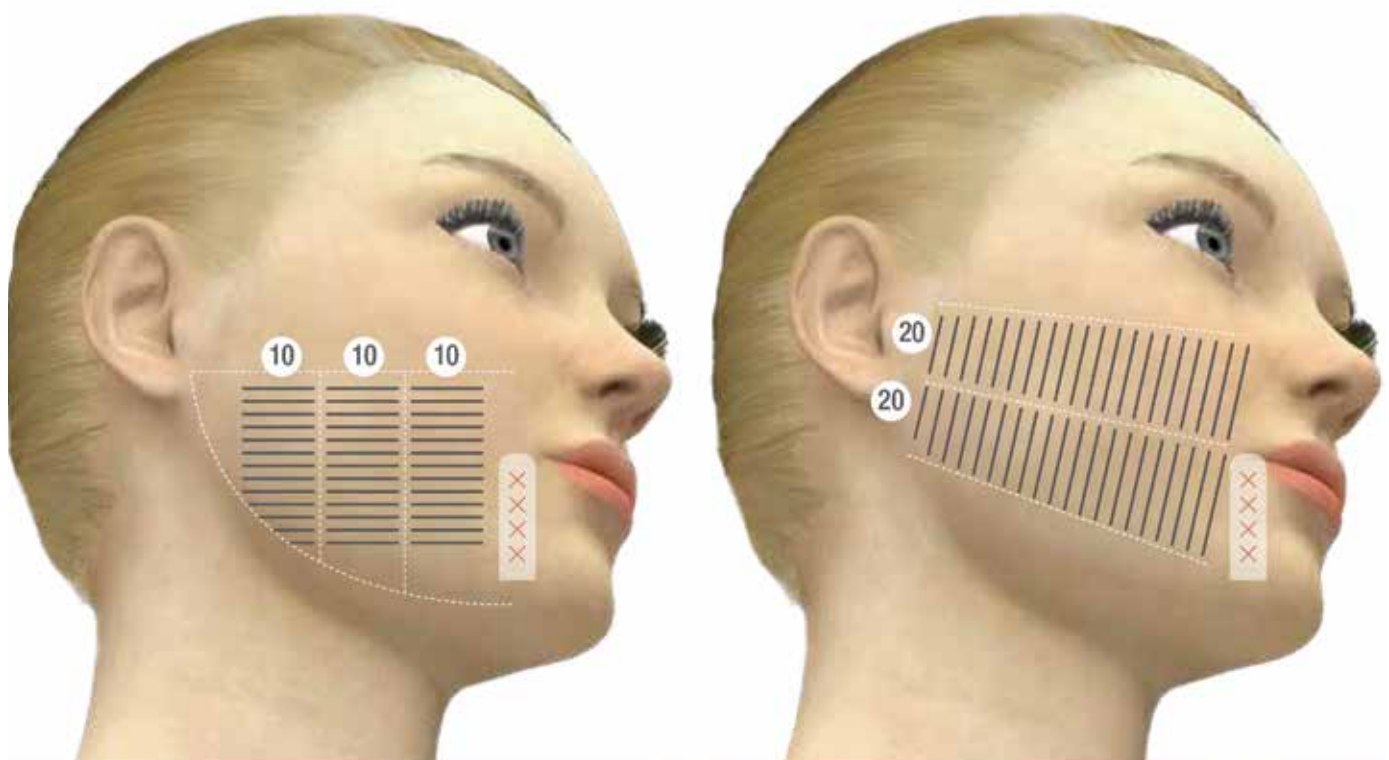


Cartridge	Energy	Pitch	Passes	Shots
● 4.5mm	0.4-0.6J	1.0-1.5mm	2	70/70
● 3.0mm	0.3-0.5J	1.0-1.5mm	2	70/70
● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	1	30/30

- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב המנדיבולרי השולי.
- כאשר מטפלים בשכבות מרובות, יש לטפל מעומק לרדוד לפי סדר רצף.
- לדוגמא: 4.5 מ"מ ◀ 3.0 מ"מ ◀ 1.5 מ"מ
- ליישומי טיפול עם שני מעברים, מומלץ למטפלים ליישם טיפול בתבניות אופקיות ואנכיות כאחד.
- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.
- *להלן המלצות לטיפול באזורי היעד בפנים.

אופן הטיפול

צוואר וקו הלסת

[● 1.5mm]

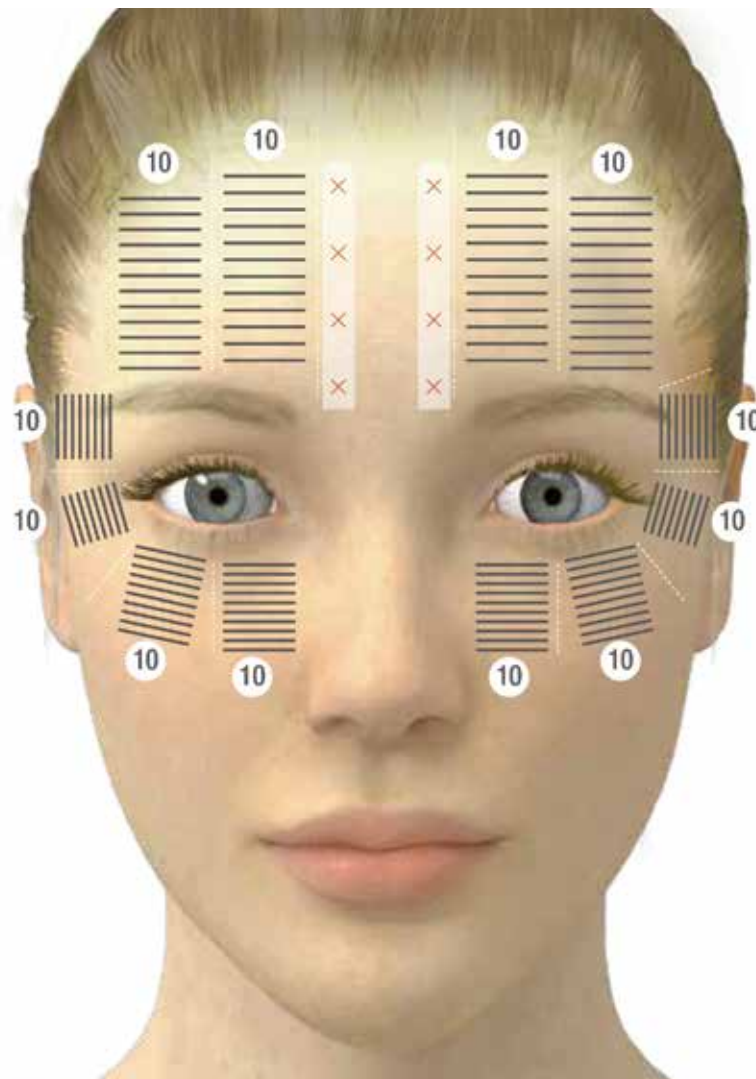

מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים	פולסים
● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	1	120

- אין להתחיל טיפול ישירות על העצבים העל-סוערים או הזמניים.
- התאם את אורך הפולס בין 10 ל- 15 מ"מ מכיוון שקשה למתמר ליצור מגע מלא עם האזור הנגדי והמצח.
- יש למטופלים לעצום את עיניהם בעת הטיפול.
- כאשר מטפלים בקרבת קו הגבה, משוך את המתמר חזק יותר אל המצח כדי להפחית את הכאב.
- ליישומי טיפול במעבר 1 יש להחיל את דפוס הטיפול לפי ההוראות.

*להלן המלצות לטיפול באזורי היעד בפנים.

אופן הטיפול

שלבי טיפול לגוף

1. הפעלת המערכת

לחץ על סמל ז' שבמתג ההפעלה AC ולחץ על מתג ההפעלה מול הגוף הראשי כדי להפוך את למערכת פועלת.

2. בחירת מחסניות וידית

על המטופלים לעמוד בתקנים של כל מחסנית גוף על סמך בדיקת הצביטה מכוון לאזור הטיפול:

B2-6.0: עומק של לפחות 1.2 ס"מ

B2-9.0: עומק של לפחות 1.8 ס"מ

B2-13.0: עומק של לפחות 2.5 ס"מ

3. בדיקת מחסנית הגוף

בדוק תמיד את תנאי המחסנית לפני שתמשיך בטיפול.

* עיין ב'בדיקת מחסנית הגוף' במדריך טיפול זה.

4. מריחת ג'ל אולטראסאונד

מרחו כמות מספקת של ג'ל אולטראסאונד על אזור הטיפול כחומר סיכה בין הידית לבין העור במהלך ההליך. יש להקפיד למרוח שוב כמות מספקת של ג'ל במידת הצורך.

⚠ אין למרוח כמות עודפת של ג'ל אולטראסאונד בכדי למנוע הצטברות נוזלים לחדור אל החלק האחורי של השטח וליצור קצר.

5. טעינת הידית

יש להסיר את הידית ממתקן המחזיק אותה, המכשיר יזהה אוטמטית התחלת פעולה יטען את ממשק המשתמש הגרפי (GUI) לממשק המחסנית שלו בהתאמה.

6. הגדרת פרמטרים והעדפות

הגדר את הפרמטרים וההעדפות בממשק המשתמש הגרפי (GUI) ולחץ על READY.

ניתן להתאים אישית את ההגדרות הבאות:

- זרימת אנרגיה

- גובה הצליל

- מצב ירייה יחידה / חוזרת

- בקרת כאב / מצב רגיל

- אזעקות

- טיימר

- עוצמה

* לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך התחזוקה של ULFIT.

7. הפעלת הידית:

הנחת את חלקו של גוף היד במגע מלא על אזור הטיפול ולחץ על הטריגר של הידית כדי לפלוט אנרגיית אולטראסאונד. * לפרטים נוספים על הימנעות מאזורים גרמיים ואזורי עצבים בעת יישום של גוף היד ULFIT במהלך טיפול, עיין באמצעי זהירות ספציפיים שמתחת לכל פרק טיפול ו'הזהירות לנהלי גוף' בנושא זה מדריך טיפולים.

מצב פולסים חוזרים:

- מצב פולסים חוזרים אינו מחייב לחיצה על הטריגר אחרי כל פולס.
- * יש להזיז מחסניות במהירות איטית עד בינונית עד לקצב מהיר.

8. השהיית תהליך:

כדי להשהות את השימוש במחסנית הגוף, לחץ על הטריגר להפסקת פליטת אנרגיית האולטראסאונד.

הפסקת תהליך

כדי להפסיק את השימוש במחסנית הגוף תוך כדי מצב פולסים חוזרים, לחץ על הטריגר כדי להפסיק את רץ הפולסים ביישום והמשיך ללחוץ על STANDBY על ממשק המשתמש הגרפי (GUI).

⚠ בעת הטיפול עם מחסנית הגוף במצב פולסים חוזרים, יש להקפיד לשמור על המחסנית כל הזמן בתנועה.

מצב פולס בודד

- מצב SHOT SINGLE דורש לחיצה על כפתור ה-SHOT לכל יציאת פולס.
- ⚠ אין ליישם אנרגיית אולטראסאונד על גבי אותו איזור טיפול ברציפות.

8. השהיית או הפסקת תהליך:

כדי להשהות או להפסיק את השימוש במחסנית הגוף, לחץ על STANDBY בממשק המשתמש הגרפי (GUI).

⚠ כאשר מטפלים עם מחסנית הגוף בסינגל-פולס בודד יש להקפיד לשמור על המחסנית במצב נייח בעת יציאת הפולסים.

9. ניקוי המחסנית והידית

נגב את המחסנית במשטח הכנת אלכוהול איזופרופיל רגיל של 50-70% לפני שמכניסים אותו למתקן שמחזיק את הידית

10. ניקוי אזור הטיפול

נגב את אזור הטיפול לכל ג'ל אולטראסאונד שנותר עם רטיות רטובות או כריות כותנה.

אופן הטיפול

בדיקת מחסנית גוף


ישנם מקרים בהם מחסנית הגוף עלולה להיחשף ללחץ אוויר חיובי או שלילי שיגרום סיבוב לא תקין של המתמר במהלך הטיפול.

אם במקרה המתמר לא מבצע סיבוב מלא או מוצלח במהלך בחינת הפולס, יש לנקוט באמצעי זהירות:
 - שימו לב אם חלון המשטח מתנופף באופן חיצוני או דוחף פנימה ככל שיהיה המתמר במגע ישיר עם חלון השטח.
 - הניחו את הידית עם חור הסיכה של המחסנית כלפי מעלה והכניסו סיכת מתכת לחור אליו לשחרר או להכניס לחץ אוויר מתוך המחסנית או לתוכה.

יש לירות פולס לצורך בדיקה נוספת בכדי לראות אם המתמר מסתובב כראוי.

בדוק את מחסנית הגוף באופן תדיר כדי להבטיח טיפולים בטוחים ויעילים עם מכשיר ה- ULFIT.

⚠ אם סיכת המתכת מוכנסת לפתח כאשר חור הסיכה אינו פונה כלפי מעלה, מים עלולים לדלוף החוצה מהפתח של המחסנית ונכנס למאוורר הקירור וגורם לו לקצר.

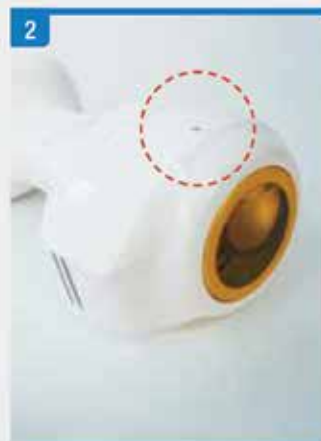

אופן הטיפול

פרמטרים לטיפול גוף


זרועות עליונות



מחסינית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.0-1.7J	4.0mm	200/200

- אין להתחיל טיפול ישירות על עצב האולנאר.
- כאשר מטפלים בזרועות עליונות יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

קו חזה

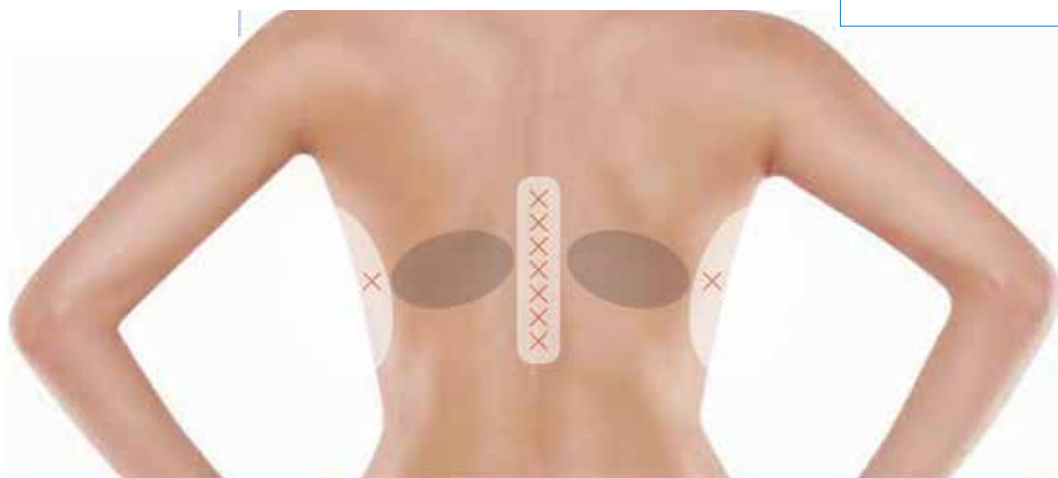

מחסינית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.2-1.7J	4.0mm	200/200
● 9.0mm	1.0-1.5J	4.0mm	200/200

- אין להתחיל טיפול ישירות על הצלעות או עמוד השדרה.
- כשמטפלים בקו החזיה יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

אופן הטיפול

קו המותניים



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.3-2.0J	4.0mm	400/400
● 9.0mm	1.0-1.5J	4.0mm	400/400
● 13.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400

- אין להתחיל טיפול ישירות בעמוד השדרה האחורי העליון (PSIS) או באגן.
- בעת הטיפול בידיות המותניים יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

צידי הגוף



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400
● 9.0mm	1.6-2.3J	4.0mm	400/400
● 13.0mm	1.3-1.8J	4.0mm	400/400

- אין להתחיל טיפול ישירות על הצלעות או האגן.
- כאשר מטפלים בצידי הגוף יש להתחיל טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

אופן הטיפול

קו המותניים



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	0.5-2.0J	4.0mm	400/400
● 9.0mm	1.3-1.8J	4.0mm	400/400
● 13.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400

- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
- כאשר מטפלים בירכיים הפנימיות יש להתחיל את הטיפול בצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

ירכיים פנימיות



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400
● 9.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400

- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
- כאשר מטפלים בירכיים החיצוניות יש לבצע טיפול מצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

אופן הטיפול

בטן



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	800
● 9.0mm	1.8-2.5J	4.0mm	800
● 13.0mm	2.0-2.8J	4.0mm	800

- אין להתחיל טיפול ישירות על הטבור, הצלעות או האגן.
 - בעת טיפול בבטן, יש להקפיד לחלק את המקום המטופל לאיזורי טיפול

מתחת לישבן



מחסנית	אנרגיה	עומק	מעברים
● 6.0mm	1.5-2.0J	4.0mm	400/400

-- אין להתחיל טיפול ישירות בעצב הסיאטי.
 - כאשר מטפלים מתחת לישבן, יש להתחיל את הטיפול בצד אחד בכל פעם לפני שממשיכים לצד השני.

עיין בחומרי ההדרכה הנוספים לטובת שימוש נכון ומקצועי במכשיר- ULFIT.

-מדריך תחזוקה

-מדריך התקנה

-מדריך מהיר להפעלה

-מדריך הפעלה

לפניות נוספות צרו קשר:

info@cluederm.com

מדריך טיפולים

יצרן CLASSYS בע"מ

טל' 82-2-517-2114 פקס + 82-2-6008-3457

אתר אינטרנט: www.cluederm.com דוא"ל: info@cluederm.com